

Sentinex® Solo OP-Mantel **NEU**

Setzen Sie neue Standards in
Effizienz und Sicherheit im OP.



Sentinex® Solo NEU

Der erste selbstanziehbare OP-Mantel.

OP-Bekleidung nimmt eine tragende Rolle in den Arbeitsabläufen jeder OP-Abteilung ein.

Als zuverlässiger Partner für Sentinex OP-Bekleidung pflegen wir seit Jahrzehnten einen engen Kontakt zu unseren Anwendern und versuchen stets, innovative Lösungen für individuelle Herausforderungen zu finden.

So haben wir auch das Bedürfnis nach einem OP-Mantel erkannt, der alleine angezogen und korrekt geschlossen werden kann.

Der **Sentinex® Solo** bietet neben den Eigenschaften eines Sentinex® OP-Mantels in gewohnter L&R Qualität einen entscheidenden Vorteil hinsichtlich Sicherheit und Zeitersparnis: **Man kann ihn ohne die Unterstützung einer zweiten Person korrekt steril anziehen.**



Sentinex® Solo **NEU**

Der erste selbstanziehbare OP-Mantel.



In einem **von L&R entwickelten und patentierten Anziehprozess** bekleidet sich der Anwender in wenigen Schritten selbstständig.



Der Anziehprozess basiert auf einem **speziell geschaffenen Wand-Fixiersystem**.



Durch die Kombination mit einem **leicht erlernbaren Bewegungsablauf** dreht man sich in den OP-Mantel hinein.



Einzigartige, innovative Produktdetails stellen dabei sicher, dass der Sentinex Solo alleine korrekt angelegt und geschlossen werden kann.

Eine ausführliche Video-Anleitung, wie der Sentinex Solo angezogen wird, finden Sie hier:



Sentinex® Solo **NEU**

Ein magischer Trick für viele Bühnen.

Der Sentinex® Solo eignet sich als OP-Mantel für jeden Eingriff. Das alleinige Anziehen bietet in einer Vielfalt von Situationen einen entscheidenden zeitlichen und hygienischen Vorteil.

Vor dem Hintergrund komplexer Dynamiken in Gesundheitseinrichtungen, wie des wachsenden Fachkräftemangels oder Zeitmangels, hat L&R mit dem Sentinex® Solo einen Lösungsansatz entwickelt, der eine optimale Nutzung der verfügbaren Ressourcen gewährleistet.

Damit eignet er sich insbesondere für die folgenden Anwendungsfelder:



Notfallsituationen

**es kommt auf jede Minute an,
z. B. ungeplanter Kaiserschnitt, Milzriss**

- Instrumentierende:r kann sich ohne Wartezeit selbst steril anziehen und direkt mit der sterilen Vorbereitung der Instrumententische starten
- unsterile Assistenz kann sich auf Kernaufgaben konzentrieren, z. B. Vorbereiten des/der Patient:in

Sentinex® Solo **NEU**

Ein magischer Trick für viele Bühnen.

Der Sentinex® Solo eignet sich als OP-Mantel für jeden Eingriff. Das alleinige Anziehen bietet in einer Vielfalt von Situationen einen entscheidenden zeitlichen und hygienischen Vorteil.

Vor dem Hintergrund komplexer Dynamiken in Gesundheitseinrichtungen, wie des wachsenden Fachkräftemangels oder Zeitmangels, hat L&R mit dem Sentinex® Solo einen Lösungsansatz entwickelt, der eine optimale Nutzung der verfügbaren Ressourcen gewährleistet.

Damit eignet er sich insbesondere für die folgenden Anwendungsfelder:



Personalknappheit

z. B. Fachkräftemangel, Bereitschaftsdienst, Nachtdienst

- Instrumentierende:r kann sich ohne Wartezeit selbst steril anziehen und direkt mit der sterilen Vorbereitung der Instrumententische starten
- jede:r im OP-Team kann sich auf die eigenen Kernaufgaben fokussieren
- reduziert die Fehleranfälligkeit

Sentinex® Solo **NEU**

Ein magischer Trick für viele Bühnen.

Der Sentinex® Solo eignet sich als OP-Mantel für jeden Eingriff. Das alleinige Anziehen bietet in einer Vielfalt von Situationen einen entscheidenden zeitlichen und hygienischen Vorteil.

Vor dem Hintergrund komplexer Dynamiken in Gesundheitseinrichtungen, wie des wachsenden Fachkräftemangels oder Zeitmangels, hat L&R mit dem Sentinex® Solo einen Lösungsansatz entwickelt, der eine optimale Nutzung der verfügbaren Ressourcen gewährleistet.

Damit eignet er sich insbesondere für die folgenden Anwendungsfelder:



Ambulantes Operieren

Bereiche, wo generell nur eine einzige Person für die Instrumentation vorgesehen ist

- Anwender:in kann sich ohne Wartezeit selbst steril anziehen und direkt mit der sterilen Vorbereitung der Instrumententische starten
- übriges OP-Personal (z. B. Anästhesist:in) kann sich auf die Kernaufgaben konzentrieren

Sentinex® Solo **NEU**

Ein magischer Trick für viele Bühnen.

Der Sentinex® Solo eignet sich als OP-Mantel für jeden Eingriff. Das alleinige Anziehen bietet in einer Vielfalt von Situationen einen entscheidenden zeitlichen und hygienischen Vorteil.

Vor dem Hintergrund komplexer Dynamiken in Gesundheitseinrichtungen, wie des wachsenden Fachkräftemangels oder Zeitmangels, hat L&R mit dem Sentinex® Solo einen Lösungsansatz entwickelt, der eine optimale Nutzung der verfügbaren Ressourcen gewährleistet.

Damit eignet er sich insbesondere für die folgenden Anwendungsfelder:



Rüstzonen

die Instrumententische werden in eigenen Bereichen, von den Operationssälen getrennt, vorbereitet

- eine Person kann sich ohne Wartezeit selbst steril anziehen
- diese Person kann bereits alleine mit der sterilen Vorbereitung der Instrumententische starten

Innovative Entwicklungsarbeit ist mehr als Zauberei.



In den eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren arbeitet L&R stetig an der Verbesserung vorhandener sowie an der Entwicklung neuer, innovativer Produkte mit bemerkenswerten Vorteilen für Mitarbeiter:innen im Gesundheitswesen.

Der Sentinex Solo wurde daher in einem aufwändigen Prozess und in enger Abstimmung mit Kund:innen entwickelt. In mehreren Runden zwischen dem Entwicklungslabor, Testungen mit internationalen Kund:innen sowie in Abstimmung mit unseren erfahrenen Kolleg:innen am eigenen Produktionsstandort für Sentinex OP-Mäntel wurde dem Sentinex Solo der Feinschliff verliehen.



Magisch überzeugend durch zuverlässige Sicherheit & Hygiene.



Wer Sicherheit groß schreibt, greift zum Sentinex® Solo.

Er bietet eine zuverlässige Infektionsprävention und Hygiene durch einen korrekt alleine geschlossenen sterilen OP-Wickelmantel.

Eigenschaften & Funktion

- korrektes, sicheres alleiniges Verschließen des sterilen OP-Wickelmantels
- Minimierung des Risikos einer Kreuzkontamination
- leicht erlernbarer Anziehprozess
- standardisierter, intuitiver Anziehprozess

Ihr Nutzen

- zuverlässige Infektionsprävention
- erhöhter Schutz und Sicherheit
- einfache Schulung des Personals
- Erleichterung der Einhaltung der Hygienestandards

Zeit- und Kostenersparnis ganz ohne Zaubertricks.



Wer für die Wirtschaftlichkeit von Gesundheitseinrichtungen verantwortlich ist, zählt auf den Sentinex® Solo.

Das schnelle Anziehen ohne Unterstützung optimiert Prozesse, führt zu OP-Effizienzsteigerungen und spart damit kostbare Zeit und Geld. Ein effizienterer Personaleinsatz wird durch die Entlastung des OP-Teams und die damit verbundene Fokussierung auf die Kernaufgaben ermöglicht.

Eigenschaften & Funktion

- das Design des OP-Mantels ermöglicht eine intuitive Handhabung
- schnelles Anziehen ohne Unterstützung
- sofortiges Ankleiden ohne Wartezeit
- reduzierte Rüstzeiten und schnellere Teamwechsel

Ihr Nutzen

- das alleinige sterile Anziehen des OP-Mantels wird beschleunigt
- Erhöhung der Unabhängigkeit
- effektiver Personaleinsatz der OP-Teams durch Fokussierung auf Kernaufgaben
- das alleinige sterile Anziehen ohne Assistenz spart wertvolle Zeit bei der sterilen Vorbereitung
- verbesserte OP-Abläufe
- effizientere Nutzung der OP-Säle


Die richtige Wahl für den magischen Moment.

Wählen Sie zwischen zwei Ausführungen – Standard und Special – sowie zwei Größen – 130 und 150 cm.

Unsere bewährte SMMS-Qualität bietet Ihnen den gewohnten Schutz und Komfort.

Sentinex® Solo OP-Mäntel SMMS steril

Größe	Länge (cm)	REF	VE (Stk.)
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag			
L	130	143061	48
XL	150	143062	40
Special „direct“ ohne Sterileinschlag			
L	130	163061	44
XL	150	163062	40

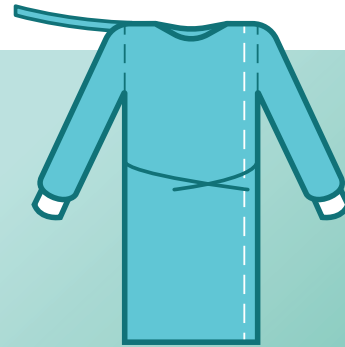


Sentinex® Solo
OP-Mantel
Standard SMMS

OP-Wickelmantel mit sterilem Rückenbereich durch besonders breite Überlappung. Beim Sentinex Solo ist diese Überlappung zusätzlich erweitert, um ein sicheres Verschließen zu gewährleisten.



Bestens geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall.

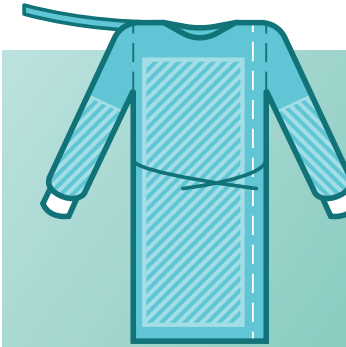

Sentinex® Solo
OP-Mantel
Special SMMS

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Standard, **zusätzlich im Front- und Ärmelbereich flüssigkeitsundurchlässig verstärkt.**



Sehr gut geeignet für Operationen mit hohem Flüssigkeitsanfall.

Der Sentinex® Solo braucht einen Haken.



Für die korrekte Anwendung des Sentinex® Solo ist ein Haken in Augenhöhe des jeweiligen Anwenders notwendig, um den Mantel alleine anzuziehen und die Sterilität ohne Bodenkontakt sicherzustellen.

Eventuell finden sich in den Räumlichkeiten bereits nutzbare Optionen.

Wir bieten:

Vertikal justierbarer Haken,
der an einer Normschiene fixiert werden kann.

Haken	REF
Fixierte Variante (Medizinprodukt)	
Normschiene	400 061
Normschienenklaue mit Haken	400 062
Normschiene inkl. Normschienenklaue mit Haken	400 063
Mobile Variante (kein Medizinprodukt)	
Saugnapf mit Haken	400 064

**Mobile Variante
mit Saugnapf**



Stimmen aus der Praxis

„Enge Zusammenarbeit und direkter Austausch.“

„Enge Zusammenarbeit mit Kund:innen war uns für die Entwicklung des Sentinex® Solo besonders wichtig. Durch den direkten Austausch mit Anwender:innen bei Kundenbesuchen in diversen Ländern in unterschiedlichen Entwicklungsstufen konnte den Bedürfnissen der praktischen Anwendung optimal entsprochen werden.“

Manuela Seidl

B. A./DGKP (SAB OP)
Produktentwicklung, Forschung &
Entwicklung bei L&R



Stimmen aus der Praxis

„Eine echte Erleichterung für meinen Alltag.“



„Als ich den Sentinex® Solo das erste Mal selbst ausprobieren durfte, wurde mir sofort bewusst, dass wir es hier mit einer echten Innovation zu tun haben. Das selbstständige Verschließen ist eine echte Erleichterung für meinen Alltag.“

Robert Krug

Bereichsleiter OP- und Anästhesiepflege
SRH Wald-Klinikum Gera

Stimmen aus der Praxis

„Viel früher mit dem Vorbereiten unserer OP-Materialien beginnen.“



„Ohne auf den Springer warten zu müssen, können wir mit dem Sentinex® Solo viel früher mit dem Vorbereiten unserer OP-Materialien beginnen – und das unter gesichert sterilen Bedingungen.“

Regina Strehmel

Leitung OP-Pflege

Evangelisches Diakoniekrankenhaus Freiburg

Stimmen aus der Praxis

„Mich überzeugt die Einfachheit des patentierten Anziehprozesses.“

„Ich freue mich sehr, dass wir von L&R hier eine Lösung bieten können, mit der Anwender:innen direkt und unabhängig losstarten können. Mich überzeugt die Einfachheit des patentierten Anziehprozesses. Steriles Ankleiden ohne die Hilfe eines Springers? Genial für den Umstieg vom Duett zum Solo!“

DGKP Theresa Schneglberger-Böhm
Akad. gepr. OP SAB



Haben wir Sie verzaubert und sind Sie bereit für den Umstieg vom Duett zum Solo?

Dann besuchen Sie gerne
für weitere Informationen
unsere Website:

Für den Sentinex Solo ist eine
Schulung empfehlenswert. Kontaktieren
Sie für diese oder weitere Fragen
gerne Ihre:n L&R Ansprechpartner:in.

