



Cellona® Polster Schnittmuster für Filztechniken

Typischerweise werden zwei diagonal gekürzte Lagen und eine ganze Lage benötigt. Bei besonders ausgeprägter Inversion/Supination können auch drei diagonal gekürzte Lagen benötigt werden.

Diese Schablone ist eine Anwendungshilfe. Für eine einwandfreie Umsetzung empfehlen wir in jedem Fall die Teilnahme an einem **lizenzierten Filzkurs Pro3F® – Fi mobil** unter Leitung eines speziell ausgebildeten Pro3F®-Filzmasters.

Diagonale 1. Lage
Diagonale 2. Lage

MTK IV / MTK V

Schuhgröße **43**

Schablone gilt für rechten Fuß.
Für linken Fuß bitte Blatt wenden.

Üblicherweise werden 2 Lagen diagonal gekürzt und eine Lage wird intakt gelassen. Bei sehr invertierten Füßen können auch 3 Lagen diagonal gekürzt werden.

Durchmesser der Aussparung individuell, ca. 3 mm vom Wundrand.

Material der Aussparung wird retrokapital als Unterstützung benutzt.

Cellona® Polster

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)
5 mm stark, im Folienbeutel			
19 x 38	50 810	021 914 12	10/60

Pro 3F® – Die Schablonen

Quelle: CID GmbH Köln
Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog


Cellona® Polster Schnittmuster für Filztechniken



MTK IV / MTK V

Schuhgröße **43**

Schablone gilt für rechten Fuß.
Für linken Fuß bitte Blatt wenden.

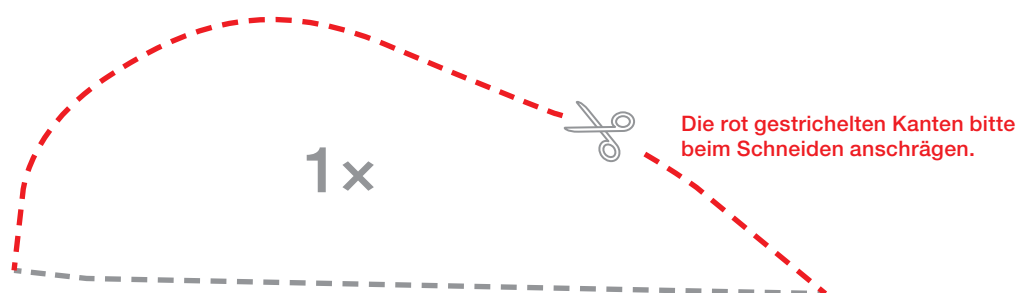

Cellona® Polster

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)
5 mm stark, im Folienbeutel			
19 x 38	50 810	021 914 12	10/60

Pro 3F® – Die Schablonen

Quelle: CID GmbH Köln
Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog