

Cellona® podloga

Kroj za rezanje za tehnike podlaganja filca

Ostatak materijala udubljenja upotrebljava se kao potpora područja iza glave metatarzalne kosti i nanosi se proksimalno na udubljenje tako da rubovi budu jedan iznad drugoga.

Promjer udubljenja pojedinačno, oko 3 mm od ruba rane.

Ciljna točka ruba udubljenja i potpore područja iza glave metatarzalne kosti: blizu ruba rane, ali bezopasno za ranu: oko 3 mm.

Glava metatarzalne kosti I

Veličine cipela **37**

3x

Cellona® podloga

Veličina (cm)	REF	Veličina pakiranja (kom.)
debljine 5 mm, u plastičnoj vrećici		
19 x 38	50 810	10/60


Izvor:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

Šablona je za desno stopalo.
Za lijevo stopalo okrenite list.


Cellona® podloga

Kroj za rezanje za tehnike podlaganja filca

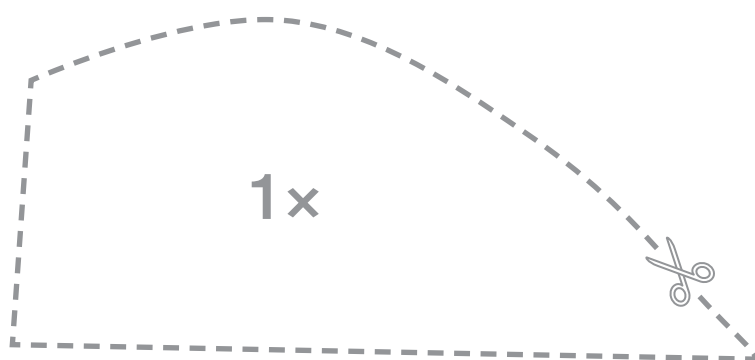

Glava metatarzalne kosti I

Veličine cipela **37**

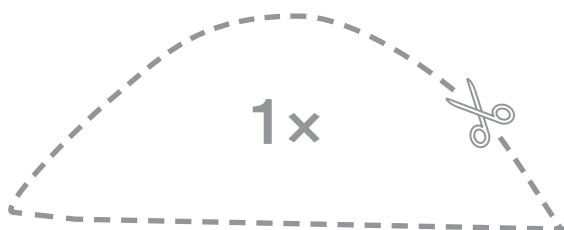

Cellona® podloga

Veličina (cm)	REF	Veličina pakiranja (kom.)
debljine 5 mm, u plastičnoj vrećici		
19 x 38	50 810	10/60

Izvor:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

Šablona je za desno stopalo.
Za lijevo stopalo okrenite list.