

## Cellona® podloga

### Kroj za rezanje za tehnike podlaganja filca

Ostatak materijala udubljenja upotrebljava se kao potpora područja iza glave metatarzalne kosti i nanosi se proksimalno na udubljenje tako da rubovi budu jedan iznad drugoga.

Promjer udubljenja pojedinačno, oko 3 mm od ruba rane.

Ciljna točka ruba udubljenja i potpore područja iza glave metatarzalne kosti: blizu ruba rane, ali bezopasno za ranu: oko 3 mm.

**Glava metatarzalne kosti I**

Veličine cipela **40**

**3x**

### Cellona® podloga

Veličina (cm)	REF	Veličina pakiranja (kom.)
debljine 5 mm, u plastičnoj vrećici		
19 x 38	50 810	10/60

**Izvor:**

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

Šablona je za desno stopalo.  
Za lijevo stopalo okrenite list.


## Cellona® podloga

Kroj za rezanje za tehnike podlaganja filca



## Glava metatarzalne kosti I

Veličine cipela **40**

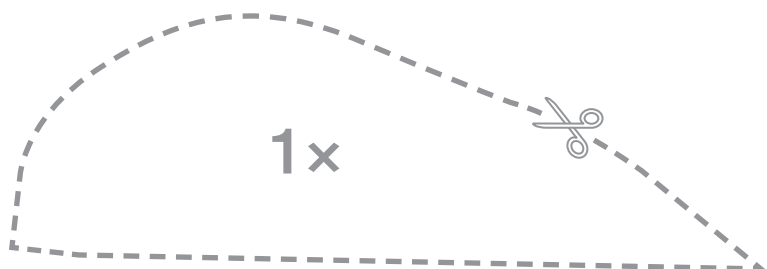

## Cellona® podloga

Veličina (cm)	REF	Veličina pakiranja (kom.)
debljine 5 mm, u plastičnoj vrećici		
19 x 38	50 810	10/60

### Izvor:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

Šablona je za desno stopalo.  
Za lijevo stopalo okrenite list.