


## Cellona® podloga

### Kroj za rezanje za tehnike podlaganja filca

Obično su potrebna dva dijagonalno skraćena sloja i jedan sloj pune duljine. U slučaju posebno izražene inverzije/supinacije mogu biti potrebna i tri dijagonalno skraćena sloja.

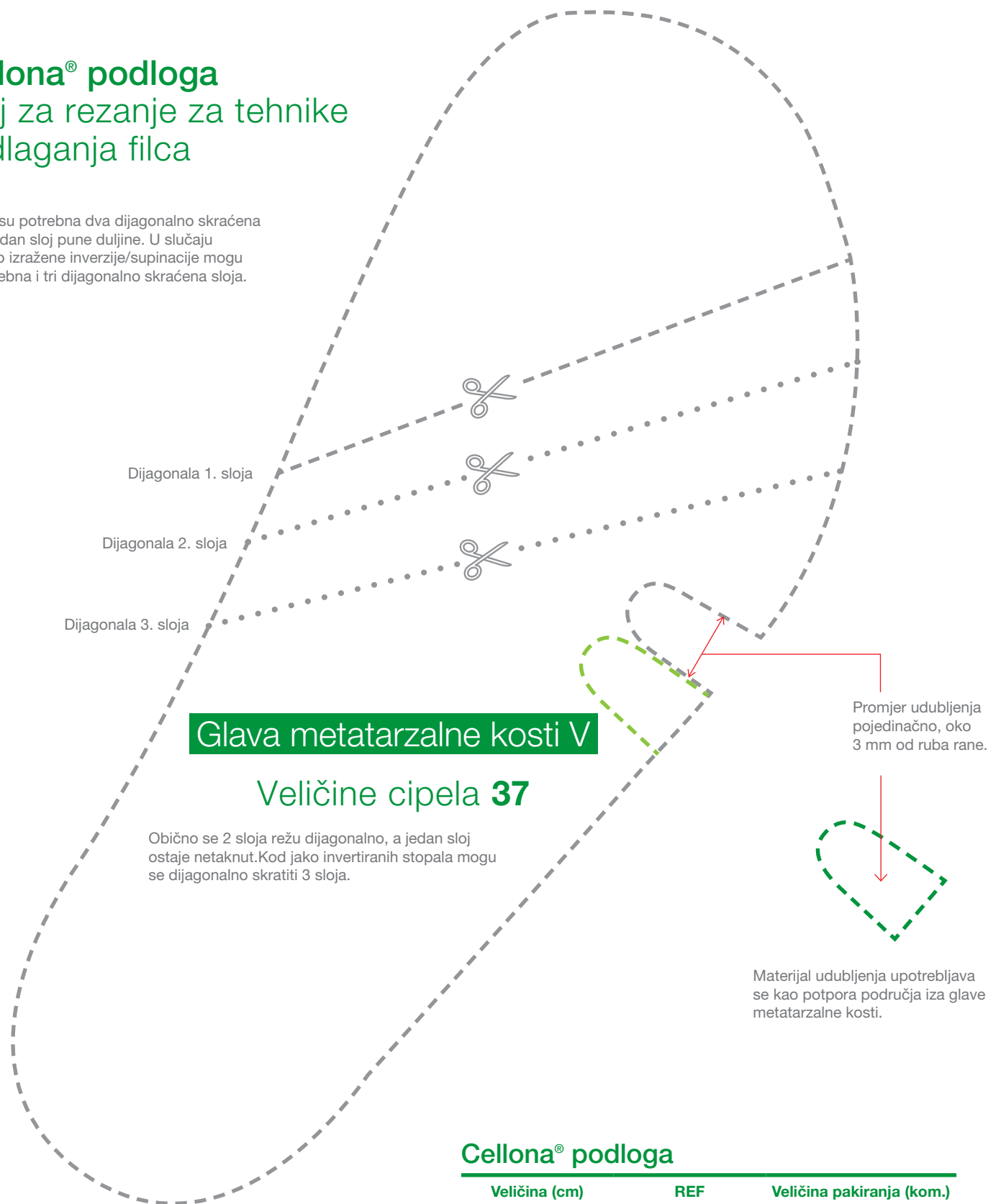

**Glava metatarzalne kosti V**

Veličine cipela **37**

Obično se 2 sloja režu dijagonalno, a jedan sloj ostaje netaknut. Kod jako invertiranih stopala mogu se dijagonalno skratiti 3 sloja.

Promjer udubljenja pojedinačno, oko 3 mm od ruba rane.

Materijal udubljenja upotrebljava se kao potpora područja iza glave metatarzalne kosti.

## Cellona® podloga

Veličina (cm)	REF	Veličina pakiranja (kom.)
debljine 5 mm, u plastičnoj vrećici		
19 x 38	50 810	10/60

### Izvor:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

Šablona je za desno stopalo.  
Za lijevo stopalo okrenite list.