

Cellona® podloga

Kroj za rezanje za tehnike podlaganja filca

Obično su potrebna dva dijagonalno skraćena sloja i jedan sloj pune duljine. U slučaju posebno izražene inverzije/supinacije mogu biti potrebna i tri dijagonalno skraćena sloja.

Dijagonala 1. sloja
Dijagonala 2. sloja
Dijagonala 3. sloja

Glava metatarzalne kosti V

Veličine cipela **40**

Obično se 2 sloja režu dijagonalno, a jedan sloj ostaje netaknut.
Kod jako invertiranih stopala mogu se dijagonalno skratiti 3 sloja.

Promjer udubljenja pojedinačno, oko 3 mm od ruba rane.

Materijal udubljenja upotrebljava se kao potpora područja iza glave metatarzalne kosti.

Cellona® podloga

| Veličina (cm) | REF | Veličina pakiranja (kom.) |
|-------------------------------------|--------|---------------------------|
| debljine 5 mm, u plastičnoj vrećici | | |
| 19 x 38 | 50 810 | 10/60 |

Izvor:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

Šablona je za desno stopalo.
Za lijevo stopalo okrenite list.