



People.Health.Care.

Suprasorb® Liquacel Ag **NEU**

Zerstört Biofilm⁴ und reduziert
das Bakterienwachstum.¹



Suprasorb® Liquacel Ag NEU

Nanosilber-Technologie macht den Unterschied – wirksam gegen Biofilm.

verstärkende Zellulosefasern stabilisieren die Struktur

Unsere Nanosilber-Technologie:

- + Die Zellulosefasern von Suprasorb Liquacel Ag enthalten oberflächliche sowie innenliegende Nanosilberpartikel.
- + Dies ermöglicht eine anhaltende und gleichbleibende antimikrobielle Wirkung.⁷
- + Die Zytotoxizität wird durch die kontinuierliche Silber-Freisetzung reduziert.^{7,8}

gelbildende Zellulosefasern passen sich jedem Wundbett an

Exsudationsgrad:



Mittel bis stark exsudierende Wunden

Wundtiefe:



Oberflächliche Wunden




Tiefe Wunden

Suprasorb® Liquacel Ag:

- als Kompresse und Tamponade erhältlich
- kann je nach Exsudationsgrad mit einem geeigneten **Sekundärverband**, z. B. Suprasorb P sensitive, fixiert werden
- auch unter **Kompression** einsetzbar
- **ist auf alle Wundgrößen und -formen** zuschneidbar



Indikationen:

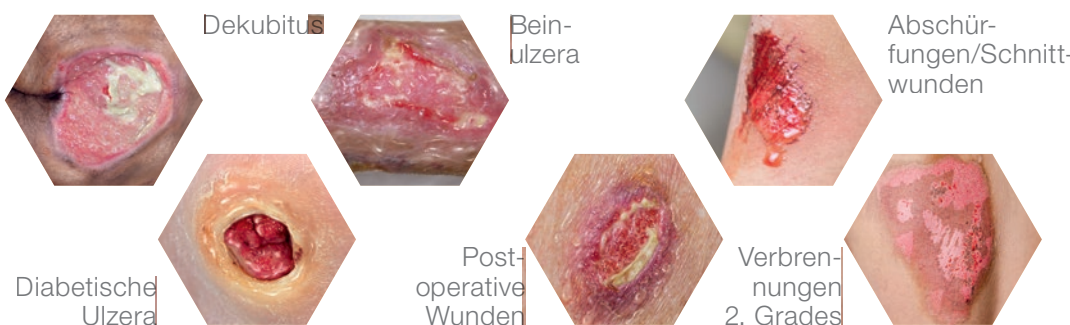

Chronische Wunden

Akute Wunden

Suprasorb® Liquacel Ag **NEU**


Hydroaktiver Faserverband.

Produkteigenschaften:



Nanosilber-Technologie

- zerstört **Biofilm**⁴
- geringe Zytotoxizität⁸
- wirksam gegen ein breites Spektrum an Krankheitserregern, z. B. **MRSA**^{*,2}

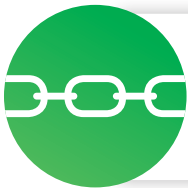

Stabile Struktur

- Entfernung **in einem Stück**³
- **keine Schrumpfung** nach Gelbildung⁹
- Patientensicherheit



Hohe vertikale Absorption



- schützt den **Wundrand**^{5,6}
- unterstützt das **autolytische Debridement**
- fördert ein effektives **Exsudatmanagement**⁵

Suprasorb® Liquacel Ag **NEU**

mit 1,1 % Nanosilberpartikeln

Wirkweise:

- bei Kontakt mit Wundexsudat bildet sich ein Gel, das ein feuchtes Wundklima aufrechterhält und das autolytische Debridement unterstützt
- die Nanosilberpartikel geben Silberionen in den Verband ab und entfalten so ihre antimikrobielle Wirkung auch gegen MRSA^{*,2}
- Bakterien, Exsudat und Zelltrümmer werden im Verband gebunden und mit dem Verbandwechsel entfernt

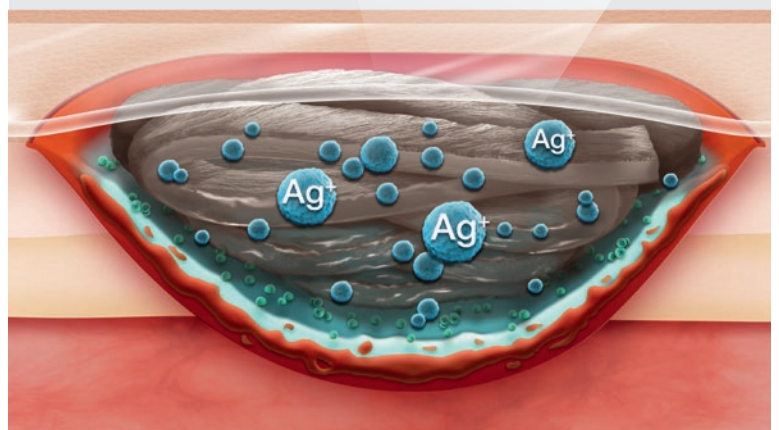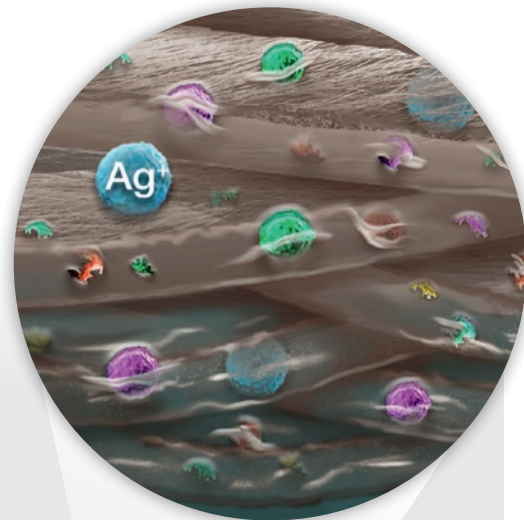


^{*}Basierend auf In-vitro-Daten.

Suprasorb® Liquacel Ag **NEU**

Antimikrobieller, hydroaktiver Faserverband – wirksam gegen Biofilm⁴ und ein breites Spektrum an Krankheitserregern.^{*,2}



Nanosilber-Technologie

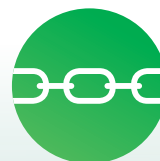

Stabile Struktur



Hohe vertikale Absorption

Suprasorb® Liquacel Ag **NEU**

Größe (cm)	REF	PZN (AT)	Pharmacode	VE (Stk.)
5 x 5	142 503	556 089 6	782 182 7	10/200
10 x 10	142 504	556 090 4	782 182 8	10/100
15 x 15	142 505	556 091 0	782 182 9	5/50
2 x 45	142 506	556 092 7	782 183 0	5/100

Quellen:

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1) VENAGTR-25 | 4) VENAGTR-63 | 7) VENAGTR-45 |
| 2) VENAGTR-46 | 5) VENAGTR-6 | 8) VENAGTR-18 |
| 3) VENAGTR-69 | 6) VENAGTR-11 | 9) VENAGTR-6 |