

Suprasorb® F Protect Folien-Wundverband.



Flexibel & dehnbar



- schmiegt sich an herausformende Körperkonturen
- dehnt sich mit der Haut, für mehr Patientenkomfort
- sicherer Halt sorgt für hohen Tragekomfort

Einfaches Handling



- problemlose Applikation mit Handschuhen
- Non-Touch Applikation
- Transparenz ermöglicht die Wundkontrolle

Schutz der Wunde




- wasser- und bakteriendicht
- Wasserdampfdurchlässigkeit hält ein feuchtes Wundmilieu
- Verminderung von reibungsbedingten Hautschäden

Suprasorb® F Protect

Wirkweise:

- A** transparente Polyurethanfolie
- B** bakterien- und wasserdicht
- C** überschüssiger Wasserdampf verdunstet

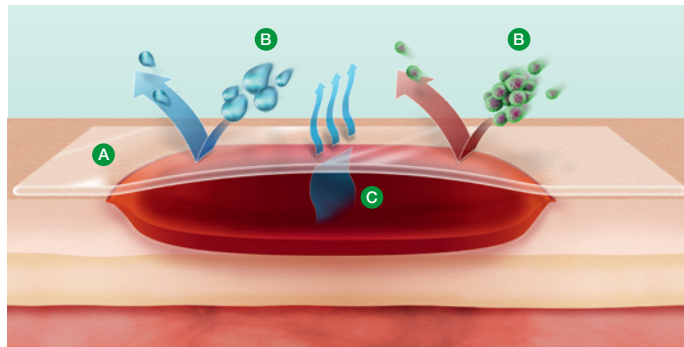

Indikationen:

- arterielle und venöse Ulzera
- diabetische Ulzera
- Dekubitus (auch zur Prophylaxe geeignet)
- Spalthautentnahmestellen
- postoperative Wunden
- Abschürfungen
- Riss- und Schnittwunden
- geringfügige Verbrennungen/Verbrühungen (Grad 1/2 a)

Kann als Sekundärverband bei infektgefährdeten Wunden verwendet werden.

Wundtiefe:



Oberflächliche Wunden


Exsudationsgrad:



Schwach exsudierende Wunden

Hinweise:

- verwendbar als Sekundärverband zur Fixierung
- zum Schutz von frischem Epithelgewebe
- das Produkt ist zum Duschen geeignet
- beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln
- das Produkt ist: Kolophonium-, Kolophoniumderivat- und DMF-frei

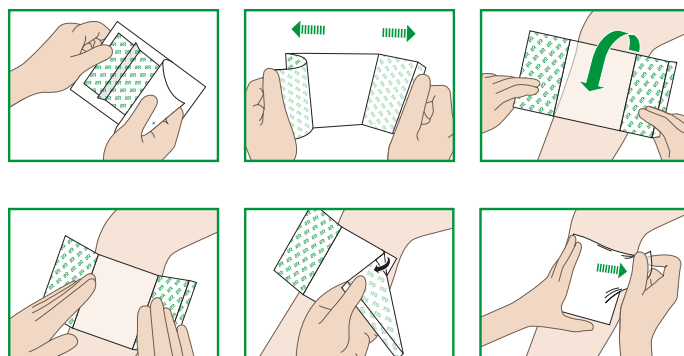

Anwendungshinweise:

- Die Wunde **vor Anlegen des Verbandes** reinigen und die Ränder trockentupfen – Suprasorb F Protect haftet optimal auf trockener Haut.
- Durch die **Non-Touch Applikation** wird eine einfache und schnelle Applikation des Verbandes ermöglicht.

Suprasorb® F Protect steriler Folien-Wundverband

Größe (cm)	REF	PZN (DE)	PZN (AT)	Pharma-code (CH)	VE (Stk.)
5 x 7	162 460	192 510 93	586 932 3	1120970	10/380
5 x 7	162 461	192 511 01	586 934 6	1120971	100/1.000
10 x 12	162 462	192 511 18	586 936 9	1120972	10/100
10 x 12	162 463	192 511 24	586 938 1	1120973	50/200
10 x 25	162 464	192 511 30	586 940 6	1120974	10/140
15 x 20	162 465	192 511 47	586 941 2	1120975	10/400
20 x 30	162 466	192 511 53	586 942 9	1120976	10/180