



People.Health.Care.

Suprasorb®
CNP endo

Terapia endoscopica
a pressione negativa nel
tratto gastrointestinale
superiore e inferiore.




L'unico sistema completo
con pressione negativa controllata e
sonda per alimentazione integrata.



endo

CNP endo – Sistema completo per la terapia endoscopica a pressione negativa

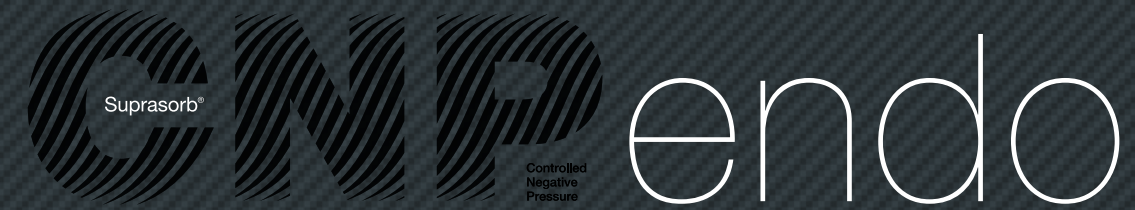

Sviluppato appositamente per la terapia endoscopica a pressione negativa L&R offre un sistema completo: un'unità terapeutica con software dedicato e quattro kit di componenti per la terapia a pressione negativa intraluminale e intracavitaria nel tratto gastrointestinale superiore e inferiore.


I Kit Suprasorb CNP endo sono concepiti per la terapia e la facilità d'uso. Contengono i componenti dedicati di cui si ha bisogno per una terapia endoscopica a pressione negativa controllata.

Unità terapeutica

Regola la pressione negativa controllata della terapia.



Drenaggio schiuma senza sonda per alimentazione

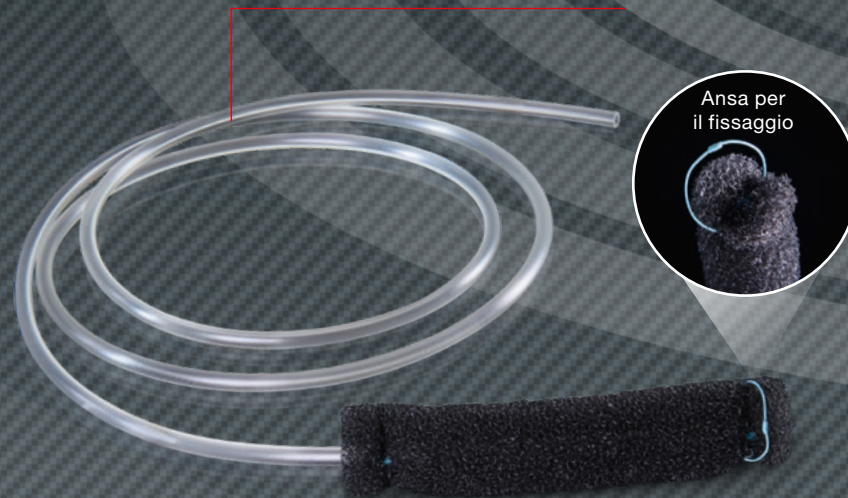

Ansa per il fissaggio

Connessione semplice con l'unità terapeutica elettromedicale

Drenaggio schiuma con sonda per alimentazione



Sonda per alimentazione integrata

I suoi vantaggi:

- sonda per alimentazione integrata nel Kit Oral N per la nutrizione simultanea
- unità terapeutica elettromedicale appositamente omologata per il nostro sistema completo
- sviluppata insieme agli operatori sanitari per gli operatori sanitari

Kit Rectal



Kit Oral



Kit Oral N



Suprasorb®

CNP endo

Posizionamento controllato nel sito della terapia.

Il sistema di posizionamento endo CNP porta il drenaggio schiuma
- fissato all'ansa - verso il sito da trattare sotto controllo visivo.

1 Facile da fissare all'estremità distale attraverso l'ansa



Nell'overtube, il drenaggio schiuma fissato
all'ansa e l'endoscopio sono posizionati
l'uno dietro l'altro.



Overtube con ansa per il fissaggio ed
un inserimento protetto.

2 Inserimento protetto attraverso l'overtube

3 Posizionamento controllato sotto guida endoscopica

Dopo il passaggio attraverso l'overtube, il drenaggio
schiuma e l'endoscopio vengono guidati in parallelo.



Terapia intraluminali dell'esofago a pressione negativa con sonda
per alimentazione integrata.



Inserimento protetto

del drenaggio schiuma con sonda
per alimentazione integrata ed
endoscopio attraverso l'overtube.



Posizionamento controllato sotto guida endoscopica


del drenaggio schiuma e della
sonda per alimentazione integrata.



Avvio della terapia CNP endo

Pressione negativa sulla lesione
contemporaneamente alla
nutrizione.

Terapia endoscopica intracavitaria a pressione negativa nell'esofago.

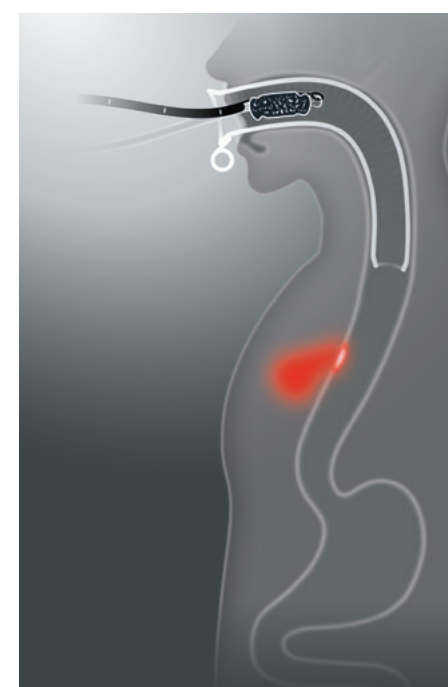

Inserimento protetto

del drenaggio schiuma e
dell'endoscopio mediante
l'overtube.



Posizionamento controllato sotto guida endoscopica

attraverso il difetto della parete nel-
la cavità della ferita extraluminale.



Avvio della terapia CNP endo

Generazione della pressione
negativa nella cavità della ferita.

Suprasorb®

CNP endo Kit Oral N


Terapia endoscopica a pressione negativa dell'esofago con nutrizione enterale simultanea.

Suprasorb CNP endo Kit Oral N viene utilizzato - in combinazione con l'unità terapeutica endo CNP - per la terapia intraluminale a pressione negativa dell'esofago.

Il Kit Oral N è unico nel suo genere grazie alla sonda per alimentazione integrata. Consente la nutrizione enterale del paziente contemporaneamente alla terapia CNP endo.

La sonda per alimentazione integrata passa attraverso il lungo e sottile drenaggio schiuma. Questo assicura la distribuzione uniforme della pressione negativa su tutta la superficie del drenaggio schiuma*.

La lunghezza della sonda per alimentazione integrata può essere adattata individualmente. Posizionabile in modo rapido e semplice nello stomaco o nell'intestino tenue.

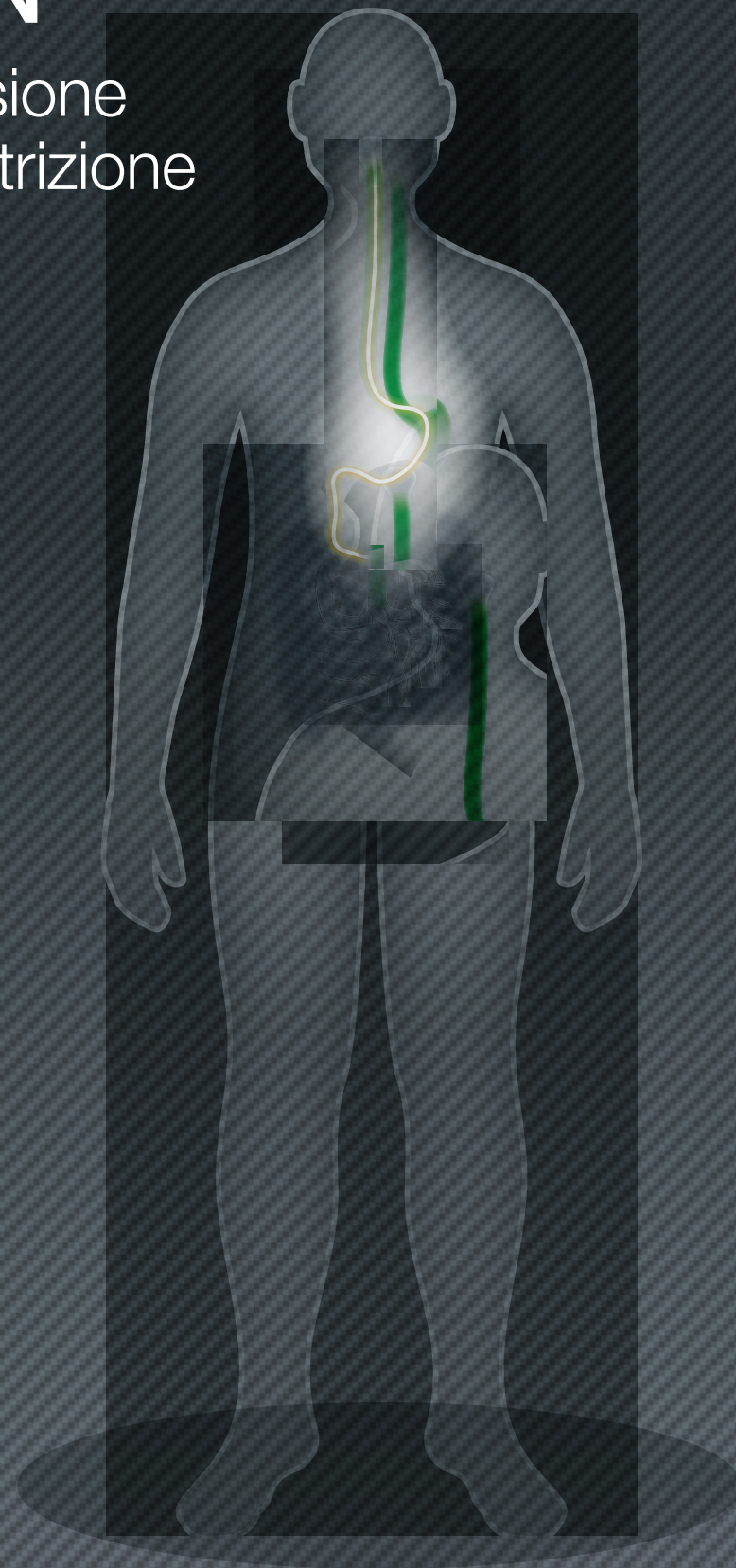

* basato su verifiche in vitro

Kit Oral N Trattamento intraluminale

- drenaggio schiuma con sonda per alimentazione integrata e a lunghezza adattabile
- overtube
- tubo nasale
- cerotto di fissaggio
- pinza serratubi



Suprasorb®

CNP endo Kit Oral

Terapia endoscopica a pressione negativa nell'esofago.

Il Suprasorb CNP endo Kit Oral non contiene la sonda per l'alimentazione ed è adatto per la terapia intraluminale e intracavitaria.

Il drenaggio schiuma del Kit Oral può essere tagliato nella lunghezza desiderata. Ciò consente di adattarlo alla cavità della ferita nel corso di un'applicazione intracavitaria.

Entrambi i kit sono caratterizzati da componenti adatti a tutte le applicazioni ed esigenze; anche il tubo nasale e il cerotto di fissaggio sono disponibili.

Kit Oral Trattamento intracavitario

- drenaggio schiuma
- overtube
- tubo nasale
- cerotto di fissaggio
- pinza serratubi



Suprasorb®

CNP endo Kit Rectal

Terapia endoscopica a pressione negativa del retto.

Il Suprasorb CNP endo Kit Rectal viene utilizzato - in combinazione con l'unità terapeutica endo CNP - per la terapia intraluminale a pressione negativa del retto.

La forma e il materiale del proctoscopio incluso nel kit sono ideali per inserire il drenaggio schiuma nel retto.

Il drenaggio schiuma viene quindi posizionato sulla lesione o nella cavità della ferita mediante guida endoscopica.


Suprasorb CNP endo Kit AddOn contiene un drenaggio schiuma e un connettore a Y aggiuntivi. Consente il trattamento di cavità più grandi, se è indicato l'uso di più drenaggi schiuma.

Kit Rectal

- drenaggio schiuma
- proctoscopio
- cerotto di fissaggio
- pinza serratubi




Applicazione intracavitaria del Kit Rectal.

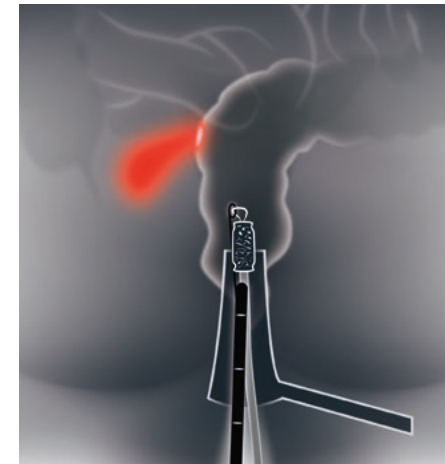

Inserimento protetto

del drenaggio schiuma e dell'endoscopio utilizzando un proctoscopio.

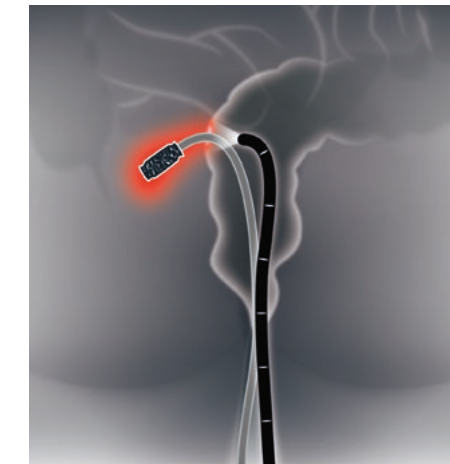

Posizionamento controllato sotto guida endoscopica


Inserimento del drenaggio schiuma nella cavità della ferita.



Avvio della terapia CNP endo

Generazione della pressione negativa nella cavità della ferita.

Applicazione intraluminale del Kit Rectal.

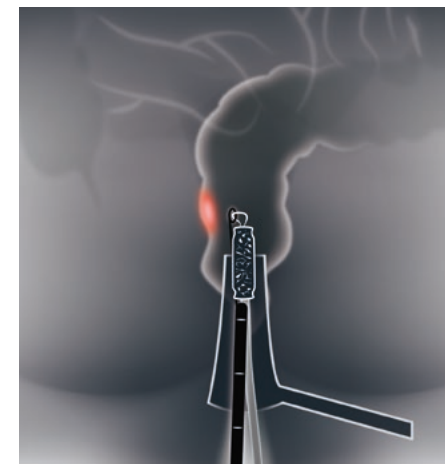

Inserimento protetto

del drenaggio schiuma e dell'endoscopio tramite proctoscopio.



Posizionamento controllato sotto guida endoscopica

Posizionamento del drenaggio schiuma sulla lesione.



Avvio della terapia CNP endo

Generazione della pressione negativa sulla lesione.

Kit AddOn

- drenaggio schiuma
- cerotto di fissaggio
- connettore a Y



Suprasorb®

CNP endo Assortimento

Un'unità terapeutica per il sistema CNP endo, nonché kit personalizzati per la terapia CNP endo nel tratto gastrointestinale superiore e inferiore.

Suprasorb® CNP endo Kit Oral N

Contenuto	Codice	SC/TC
1 drenaggio schiuma con sonda per alimentazione 1 overtube 1 tubo nasale 1 cerotto di fissaggio 1 pinza serratubi	34 200	5/20



Suprasorb® CNP endo Kit Oral

Contenuto	Codice	SC/TC
1 drenaggio schiuma 1 overtube 1 tubo nasale 1 cerotto di fissaggio 1 pinza serratubi	34 199	5/20



Misure:	
■ Lunghezza schiuma:	10 cm
■ Diametro schiuma:	2,0 cm
■ Lunghezza tubo di drenaggio:	120 cm
■ Lunghezza sonda per l'alimentazione:	125 cm (lunghezza di inserimento adattabile)
■ Lunghezza overtube: (senza fissaggio)	28 cm
■ Diametro overtube:	2 cm

Suprasorb® CNP endo Kit Rectal

Contenuto	Codice	SC/TC
1 drenaggio schiuma 1 proctoscopio 1 cerotto di fissaggio 1 pinza serratubi	34 201	5/20



Suprasorb® CNP endo Kit AddOn

Contenuto	Codice	SC/TC
1 drenaggio schiuma 1 cerotto di fissaggio 1 connettore a Y	106 500	5/20



Suprasorb® CNP endo Unità terapeutica e accessori

Prodotto	Codice	SC/TC
Unità terapeutica (vendita)	146 998	1
Unità terapeutica (noleggio)	146 999	1
Borsa per il trasporto	146 142	5/30
Contenitore dell'essudato	39 935	5
Alimentatore elettrico	159 610	1





People.Health.Care.



endo

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher s.r.l. · Via E.P. Masini 2 · IT-35131 Padova

www.Lohmann-Rauscher.com

9510128 0424 it