



Lohmann & Rauscher


Suprasorb® X+ PHMB

Medicazione HydroBalance



Suprasorb® X + PHMB

Medicazione antimicrobica HydroBalance

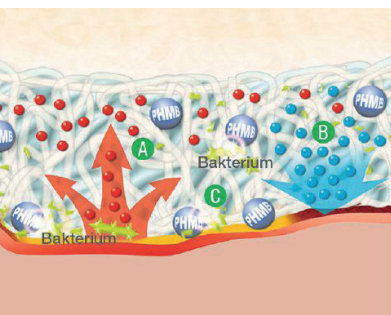

Campi di applicazione

Per la cura di ferite infette o a rischio di infezione, sia superficiali che profonde, con essudato da lieve a moderato.

Indicazioni:

- ulcere arteriose e venose
- ulcere diabetiche
- ulcere da decubito
- ustioni superficiali di 2° grado
- ferite chirurgiche post-operatorie
- trapianti di cute
- siti di prelievo di innesti cutanei
- escoriazioni, lacerazioni

Uso previsto

La medicazione antimicrobica Suprasorb® X + PHMB HydroBalance in compressa/nastro è impiegata per la guarigione o la riduzione della superficie delle ferite infette o a rischio di infezione.

Caratteristiche

- la medicazione può cedere umidità o assorbire l'essudato in eccedenza
- creazione di un ambiente umido della ferita
- cambio atraumatico della medicazione
- si adatta facilmente alla forma e alla profondità della ferita
- particolarmente indicato per aree anatomiche difficili da medicare
- l'ambiente umido con effetto rinfrescante viene percepito dai pazienti come piacevole e in grado di alleviare il dolore
- efficacia antimicrobica contro un ampio spettro di agenti patogeni, come ad es. MRSA e VRE*

Composizione del prodotto

acqua
cellulosa
0.3% poliesametilene biguanide (PHMB/poliesanide)

Avvertenze

- Nel trattamento di una ferita infetta, la medicazione non va impiegata come unica misura terapeutica, ma integrata con una terapia farmacologica secondo il giudizio del medico curante, conformemente ai protocolli clinici locali.

In caso di insorgenza dei seguenti sintomi, rivolgersi al medico curante:

- cambiamento di colore e/o di odore della ferita
- la guarigione della ferita non procede
- segni clinici di infezione

Intervallo di cambio della medicazione:

- gli intervalli di sostituzione di Suprasorb® X + PHMB vengono stabiliti dal medico curante in base allo stadio di guarigione della ferita.

Versioni

- compressa
- nastro

Suggerimento

- Qualora la medicazione dovesse asciugarsi, è necessario reidratarla a fondo almeno 10 minuti prima di rimuoverla.

Suprasorb® X + PHMB

sterile, confezionata singolarmente

	Dimensioni (cm)	Codice	UdV (Pezzi)
compressa			
	5 x 5	20540	5
	9 x 9	20541	5
	14 x 20	20542	5
nastro			
	2 x 21	20543	5

* Per lo spettro degli agenti patogeni documentato in vitro vedere 1. colonna delle Istruzioni per l'uso