



People.Health.Care.

Si prega di lavorare sempre seguendo le istruzioni per l'uso.

Utilizzare una quantità sufficiente di gel lubrificante per endoscopia durante tutte le manovre di inserimento.

Suprasorb®

Terapia con CNP endo ad uso intraluminale.

Linea guida per l'inserimento protetto e controllato del drenaggio schiuma nella lesione.



Utilizzare uno strumento di fissaggio adatto all'endoscopio. Collegare il drenaggio schiuma all'ansa situata all'estremità distale.

Durante il passaggio attraverso l'over-tube, il drenaggio schiuma è DAVANTI all'endoscopio.



Dopo il passaggio attraverso l'over-tube, guidare il drenaggio schiuma e l'endoscopio PARALLELAMENTE in direzione della lesione.



Posizionare il drenaggio schiuma nella lesione in maniera controllata mediante guida endoscopica.

Ha scelto il Kit Oral N con sonda per alimentazione integrata? Allora si deve regolare il rapporto di lunghezza tra il drenaggio schiuma e la sonda per alimentazione, a seconda delle necessità, prima dell'inserimento nell'over-tube.



endo

Terapia intraluminale

Inserimento protetto e posizionamento controllato.



Inserire il drenaggio schiuma e l'endoscopio l'uno dietro l'altro in modo protetto, utilizzando l'overtube.



Far avanzare l'endoscopio e guidarlo parallelamente al drenaggio schiuma verso la lesione. In questo modo, si posiziona in modo controllato e sotto guida endoscopica.



Sotto guida endoscopica, posizionare il drenaggio schiuma al di sotto della lesione.



Facendo avanzare con cautela l'endoscopio, controllare anche la profondità di penetrazione della sonda di alimentazione. Alla sua estremità può essere afferrata con un'apposita pinza endoscopica per adattare la posizione della sonda di alimentazione, a seconda delle necessità nello stomaco o nell'intestino tenue.



Si ha una visione endoscopica della lesione e la schiuma è posizionata al di sotto di essa. Fare scorrere il drenaggio schiuma indietro sul tubo di drenaggio, sotto guida endoscopica, fino a posizionarlo sulla lesione sia prossimalmente che distalmente in egual misura.



Avviare la pressione negativa, raccomandiamo -125 mmHg. La pressione negativa può essere adattata a seconda della situazione della ferita. La schiuma aderisce al tessuto e il lume esofageo si riduce.