



People.Health.Care.

Si prega di lavorare sempre seguendo le istruzioni per l'uso.

Utilizzare una quantità sufficiente di gel lubrificante per endoscopia durante tutte le manovre di inserimento.

Suprasorb®

Terapia con CNP endo ad uso intraluminale.

Linea guida per l'inserimento protetto e controllato del drenaggio schiuma nella lesione.



Utilizzare uno strumento di fissaggio adatto all'endoscopio. Collegare il drenaggio schiuma all'ansa situata all'estremità distale.



Durante il passaggio attraverso il proctoscopia, il drenaggio schiuma è DAVANTI all'endoscopio.



Dopo il passaggio attraverso il proctoscopia, guidare il drenaggio schiuma e l'endoscopio PARALLELAMAMENTE in direzione della lesione.


Posizionare il drenaggio schiuma nella lesione in maniera controllata mediante guida endoscopica.



endo

Terapia intraluminale


Inserimento protetto e posizionamento controllato.

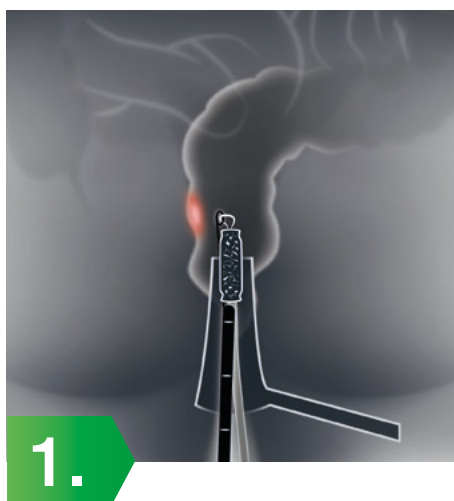

Inserire il drenaggio schiuma e l'endoscopio l'uno dietro l'altro in modo protetto, utilizzando un proctoscopio.




Far avanzare l'endoscopio e guidarlo parallelamente al drenaggio schiuma verso la lesione. In questo modo, si posiziona in modo controllato e sotto guida endoscopica.

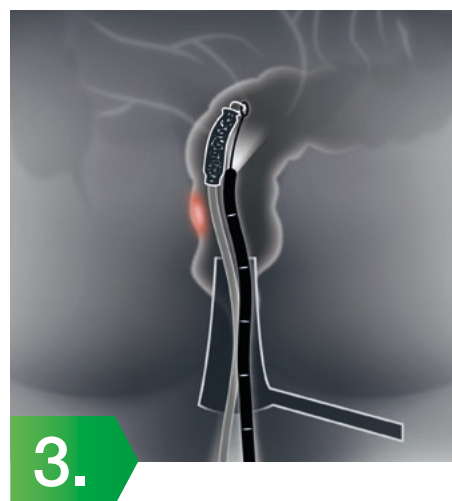

Sotto guida endoscopica, posizionare il drenaggio schiuma al di sopra della lesione.



Si ha una visione endoscopica della lesione e la schiuma è posizionata al di sopra di essa.

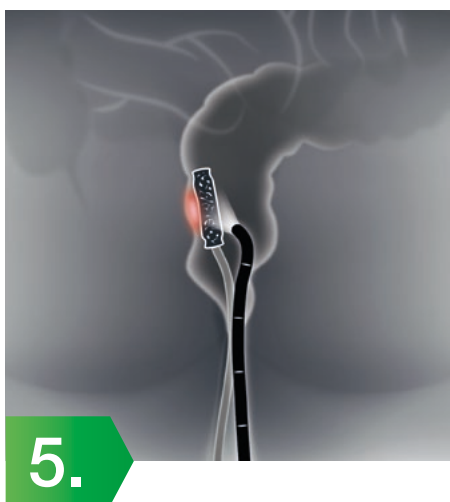

Fare scorrere il drenaggio schiuma indietro sul tubo di drenaggio, sotto guida endoscopica, fino a posizionarlo sulla lesione sia prossimalmente che distalmente in egual misura.



Avviare la pressione negativa, raccomandiamo -125 mmHg. La pressione negativa può essere adattata a seconda della situazione della ferita. La schiuma aderisce al tessuto e il retto si riduce.