



People.Health.Care.

Suprasorb®

CNP EasyDress

Innovazione 3D per la terapia a pressione negativa delle estremità.



Brevetto depositato. Insignito
con un premio per l'innovazione.

EasyDress

Suprasorb®

Controlled
Negative
Pressure

Suprasorb®


CNP EasyDress

La nostra medicazione secondaria per la vostra terapia.

Applicare, fissare, avviare la terapia. È davvero semplice utilizzare EasyDress. Grazie alla forma tridimensionale e allo speciale materiale flessibile, la medicazione secondaria per la terapia a pressione negativa gestisce le estremità **in tempi significativamente più rapidi rispetto ai metodi tradizionali.**

EasyDress è facile da applicare. È disponibile in diverse misure e può essere ritagliato nella misura necessaria, garantendo un'ottima adattabilità alle diverse forme anatomiche delle estremità. Inoltre:

Permette persino di curare le ferite difficili da raggiungere.

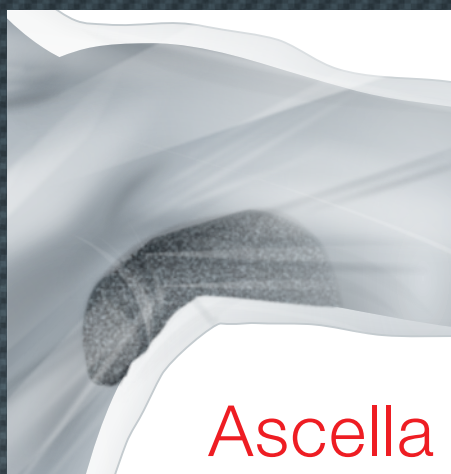


Feedback significativamente migliore.

EasyDress conquista perché è molto confortevole e protegge la cute perilesionale intatta. Per il suo comfort e la sua funzionalità risulta molto più gradito rispetto ai trattamenti tradizionali. L'accettabilità da parte dell'utente aumenta di conseguenza.

Suprasorb®

CNP EasyDress

I vostri vantaggi in sintesi.

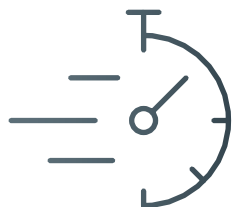

EasyDress può essere applicato facilmente, fissato rapidamente in modo affidabile. Questo dimostra che EasyDress **è efficiente in termini di tempi e costi.**



EasyDress è impermeabile ai germi, ma **molto permeabile al vapore acqueo** (almeno 2.000 ml per m² in 24 ore) e non è adesiva. Di conseguenza, la medicazione secondaria è delicata sulla cute perilesionale intatta del paziente.



Il **speciale film trasparente** di EasyDress permette di osservare la medicazione primaria e la cute perilesionale.



EasyDress è disponibile in tre dimensioni ed è **ritagliabile** nella misura richiesta. EasyDress Fixateur Externe è la 4^a dimensione della gamma EasyDress.



90%

Fino al 90% di tempo risparmiato nell'applicare la medicazione.¹



92%

Il 92% degli utilizzatori non esiterebbe a riutilizzare EasyDress.¹

Suprasorb®

CNP EasyDress

Semplice, rapido e delicato sulla cute.


Con **EasyDress** medicazione secondaria, anche le **ulcere estese della parte inferiore della gamba** possono essere trattate in modo semplice, veloce e delicato sulla cute.

1 Applicare

Scegliere **EasyDress** nella giusta misura, ritagliarlo se necessario, e applicarlo sull'estremità da trattare. La ferita è stata precedentemente trattata con una medicazione di riempimento a scelta, come ad esempio una medicazione in garza antimicrobica o una medicazione in schiuma.

Stringere la parte finale aperta e posizionarla nella **piegatura a Z** sull'estremità dell'arto. A questo punto fissare EasyDress su tutta la circonferenza con le **strisce di fissaggio**. L'area è quindi ermetica.

2 Fissare

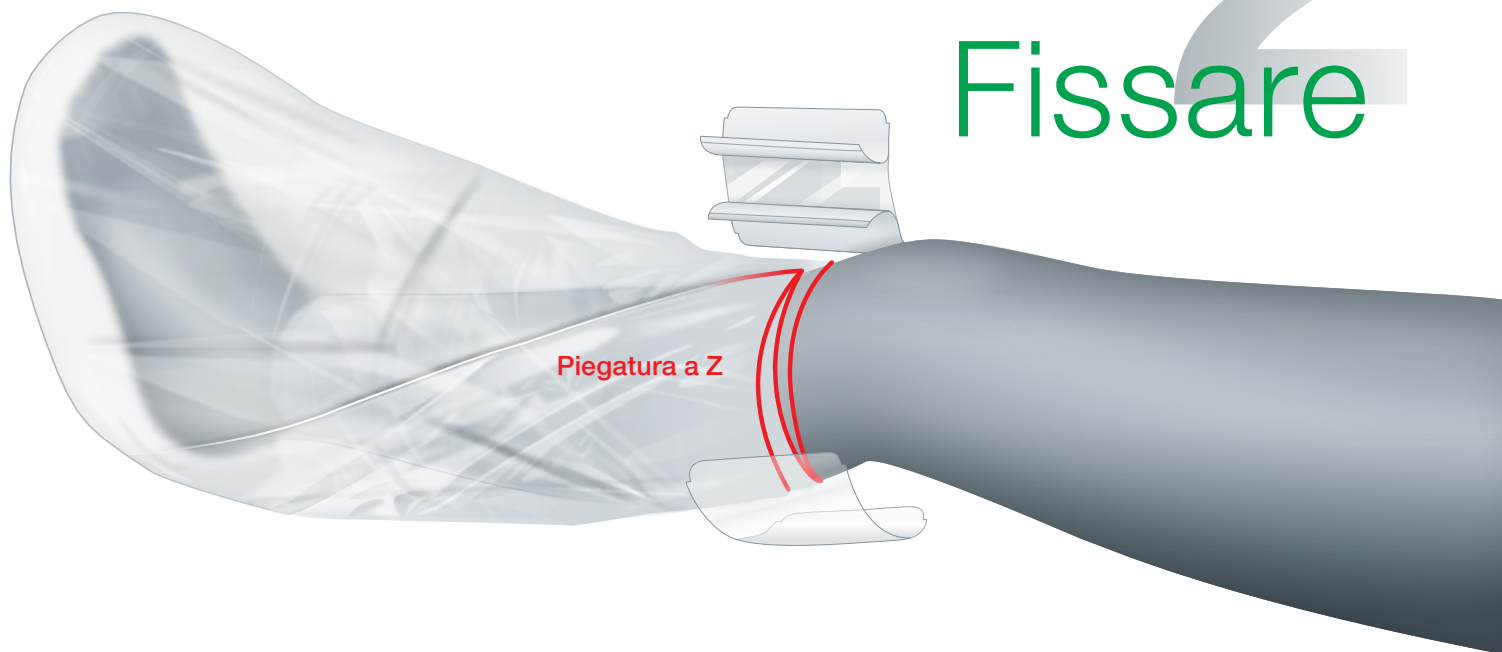




Avviare la terapia

3

Posizionare il pad di drenaggio sul foro praticato su EasyDress sopra l'area della ferita e collegarlo al dispositivo.
Pronti! Inizia la terapia a pressione negativa.

Universale per braccia e gambe


EasyDress si adatta alle **diverse forme anatomiche** degli arti superiori e inferiori.

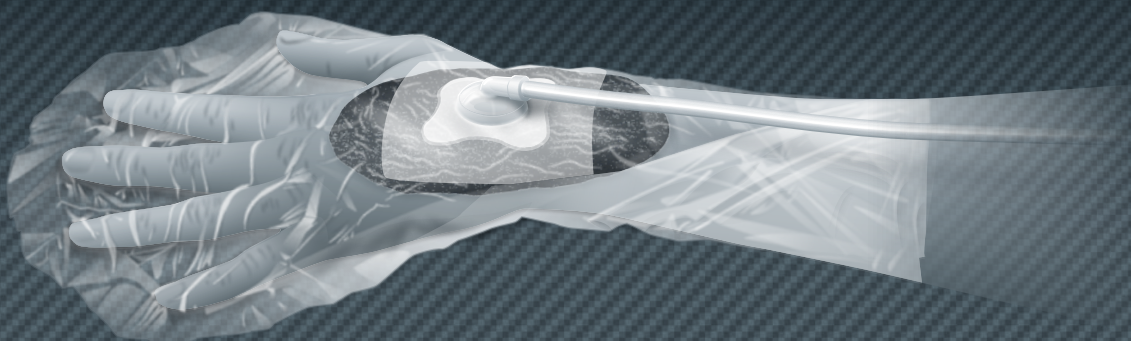



People.Health.Care.



Suprasorb® CNP EasyDress

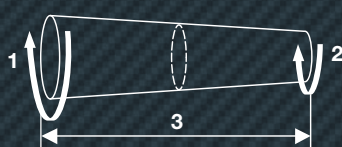Codice	Misura	Medicazione tubolare			Strisce di fissaggio
					
		1	2	3	10 cm x 12 cm
34901	S	50 cm	30 cm	70 cm	5 pz
34902	M	65 cm	40 cm	85 cm	7 pz
34903	L	80 cm	50 cm	95 cm	8 pz

Fonte:

1) M. Duft, D. Ostapowicz, S. de Lange, K. Griebhammer, M. Abel: Audit on the usability, user and patient satisfaction of tubular bandage, Multi-center international post-marketing clinical study under real conditions.

La 4ª dimensione della gamma EasyDress: Suprasorb® CNP EasyDress Fixateur Externe

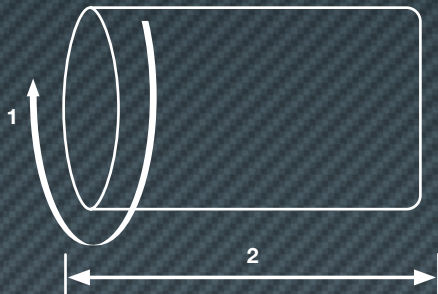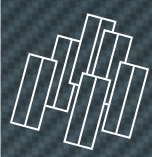Codice	Misura	Medicazione tubolare		Strisce di fissaggio
				
		1	2	10 cm x 25 cm
34905	Misura unica	150 cm	120 cm	6 pz



Suprasorb®