

Vantaggi in sintesi
di VivereX®.

Affidabile

La medicazione pronta all'uso assorbe l'essudato e consente all'umidità di evaporare. Contribuisce, inoltre, a evitare che i batteri penetrino nella ferita. Gli indicatori luminosi del dispositivo mostrano se la terapia sta funzionando o se si rendono necessari interventi.



Facile

Applicare la medicazione pronta all'uso. Premere il pulsante. Avviare la terapia. E lasciare che VivereX agisca. È così semplice.

Economico

La facilità d'uso consente una dimissione più veloce dei pazienti. Ciò riduce i costi, così come avviene con le medicazioni pronte per l'uso, grazie anche al prolungamento degli intervalli tra i cambi medicazione e a una maggiore rapidità di esecuzione. VivereX rappresenta inoltre un'opzione economica per offrire la terapia a pressione negativa delle ferite (NPWT) ai pazienti in regime ambulatoriale.




People.Health.Care.

- Ogni kit è composto da
- 1 dispositivo monouso che eroga la terapia per un periodo massimo di 10 giorni,
 - 2 batterie AA
 - 6 strisce per il fissaggio della medicazione
 - 2 medicazioni pronte all'uso in una delle 8 diverse misure di seguito riportate

Kit terapeutico VivereX®

Misura (cm)	Cuscinetto (cm)	Codice	UdV/TC
10 x 20	5 x 15	143020	1/23
10 x 30	5 x 25	143021	1/23
10 x 40	5 x 35	143022	1/23
16 x 16	10 x 10	143023	1/20
16 x 21	10 x 15	143024	1/20
16 x 31	10 x 25	143025	1/20
21 x 21	15 x 15	143026	1/13
26 x 26	20 x 20	143027	1/13

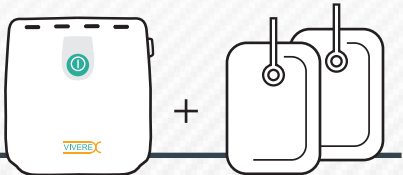

Per saperne di più sulla terapia a pressione negativa controllata (CNP):
cnp.lohmann-rauscher.com

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher AG · Oberstrasse 222 · CH-9014 St. Gallen
Lohmann & Rauscher s.r.l. · Via E.P. Masini 2 · IT 35131 Padova

In collaborazione con:



People.Health.Care.

Suprasorb® CNP presenta:

VivereX®

Il nostro pratico sistema monouso per la terapia a pressione negativa.



www.Lohmann-Rauscher.com

9509318 1022 it

Controlled
Negative
Pressure

VivereX®

L'ultima novità nella gamma CNP.


Sviluppato in Svezia da Sunmedic, L&R presenta VivereX al mercato e a lei direttamente. VivereX è un sistema di terapia a pressione negativa monouso, senza canister. Il kit terapeutico VivereX è indicato per un periodo di trattamento di 10 giorni. Le medicazioni pronte per l'uso possono essere applicate con facilità e collegate al dispositivo compatto VivereX. L'unità è alimentata da due batterie e funziona con una pressione negativa di -120 mmHg.

Con il sistema VivereX® è possibile realizzare tutti gli obiettivi del trattamento che possono essere previsti con i dispositivi NPWT monouso.




La medicazione presenta numerosi strati che offrono un assorbimento adeguato dell'essudato prima che sia necessario cambiarla. È una medicazione affidabile e avanzata che promuove la guarigione e richiede un minimo numero di cambi. Concepita in otto misure diverse, può essere utilizzata su diversi tipi di ferite ed è pratica per i pazienti. Grazie allo strato delicatamente adesivo di silicone, la rimozione è pressoché indolore.


Compatto e leggero, il dispositivo si inserisce facilmente in tasca e, di conseguenza, VivereX contribuisce alla mobilitazione precoce del paziente. VivereX dispone anche di una clip sul retro che permette di fissarlo alla cintura.

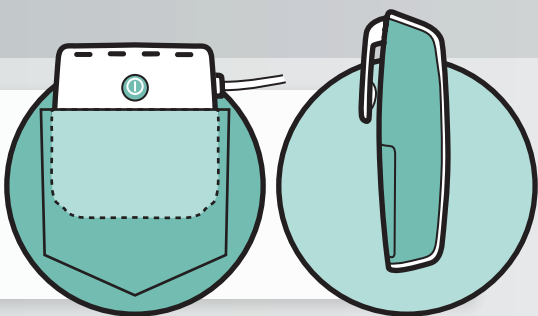


Bastano pochi passaggi per applicare VivereX®.

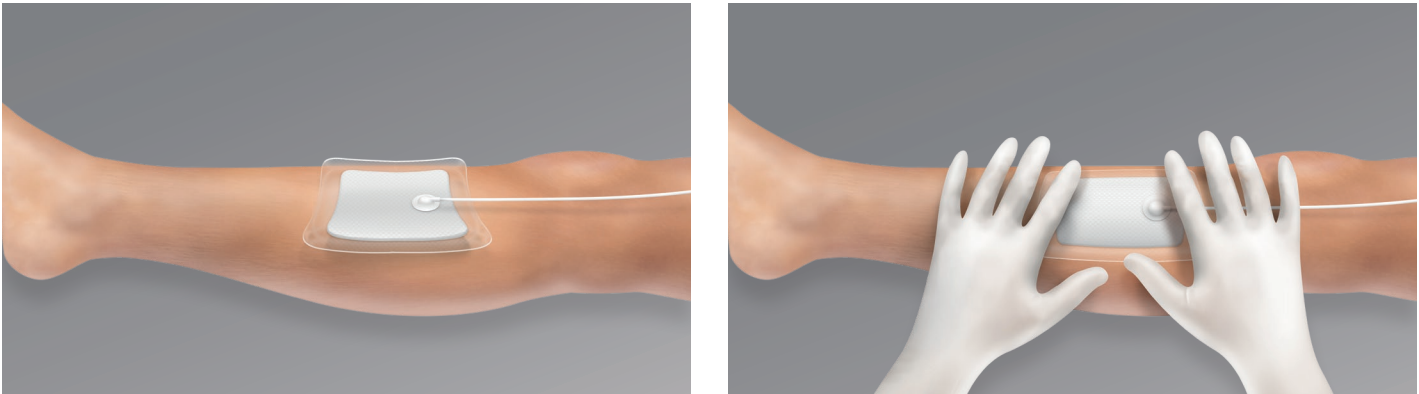

- 1 Posizionare la medicazione pronta all'uso sopra il letto della ferita.
- 2 Accertarsi che medicazione sia a tenuta ermetica. Sistemare i bordi della medicazione per eliminare le perdite d'aria.

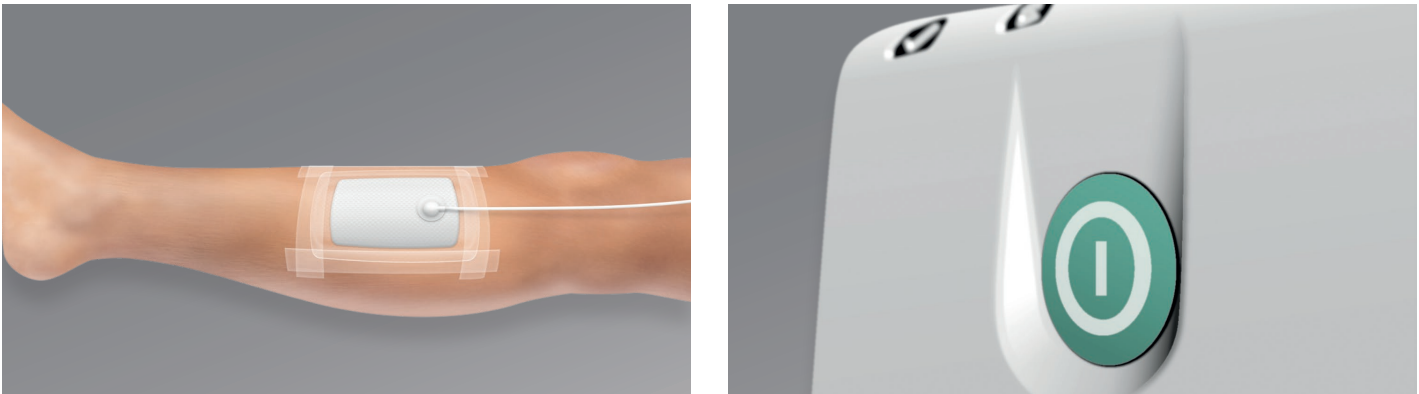

- 3 Applicare le strisce di fissaggio su tutti i bordi.
- 4 Premere il pulsante di accensione/spegnimento per avviare la terapia.

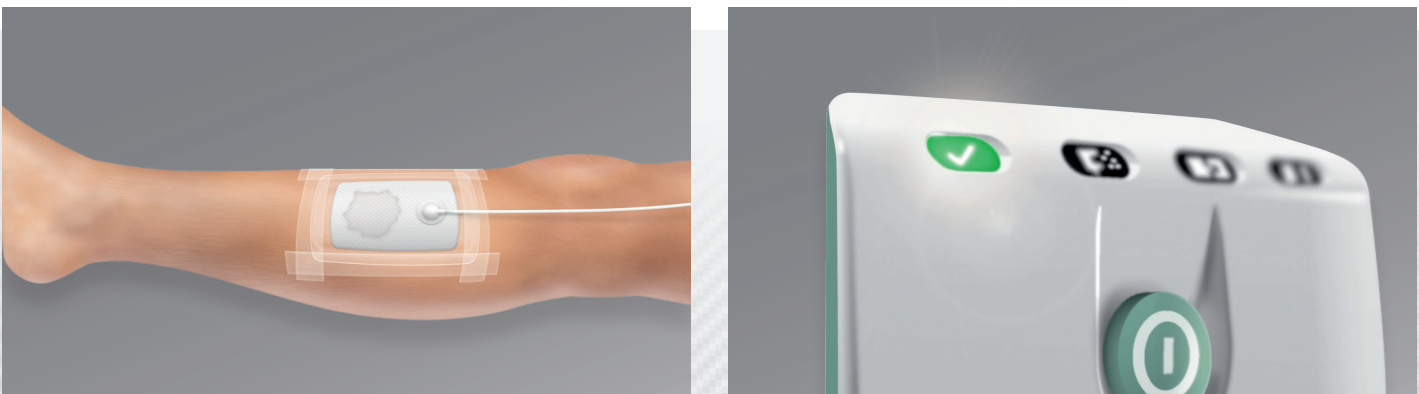

- 5 Quando il dispositivo è acceso, l'aria viene aspirata e la medicazione si contrae.
- 6 L'indicatore verde lampeggerà per indicare che la terapia è iniziata.

VivereX® non è visibile sotto gli indumenti.



VivereX è un sistema monouso affidabile, facile da usare ed economico per NPWT. È raccomandato per la prevenzione delle complicanze postoperatorie delle ferite e anche per:

- ferite acute
- ferite croniche lievemente o moderatamente essudanti
- innesti cutanei
- ulcere da decubito
- ulcere diabetiche
- ulcere venose degli arti inferiori
- incisione chirurgica pulita, chiusa
- ferite subacute deiscienti
- ferite traumatiche
- ustioni di I e II grado