

Scoprite il nuovo volto di Debrisoft® – **Debrisoft® Duo.**

Quando voglio
migliorare io

debrisofto.

Due lati,
due superfici,
una soluzione.



Quando la semplicità è importante, io **debrisoft**.



Pad per lo sbrigliamento efficiente 2-in-1:

- Il **lato originario morbido e bianco** rimuove detriti cellulari, essudato e biofilm dalla ferita.
- Il **nuovo lato beige** ruvido facilita il distacco dello slough* fibrinoso saldamente adeso.

Sviluppato sulla base dell'esperienza degli utenti per consentire uno sbrigliamento più efficace dello slough fibrinoso saldamente adeso rispetto allo sbrigliamento meccanico standard.

Debrisoft® Duo verrebbe raccomandato dal 100% degli utenti in un test di accettazione.

Debrisoft® Duo Semplifica la tua routine di sbrigliamento.



1. Inumidire

Inumidire entrambi i lati di Debrisoft Duo con soluzione salina o soluzione di irrigazione per ferite.



2. Adattare alle necessità

Inizia con uno dei due lati di Debrisoft Duo, a seconda delle condizioni della ferita, e passare all'altro lato secondo necessità.



3. Sbrigliare

Applicando una leggera pressione, passare il pad sulla ferita o sull'area cutanea interessata per 2-4 minuti, fino a quando il tessuto devitalizzato e i detriti cellulari verranno rimossi.



4. Ed è fatta

Smaltire tutti i prodotti Debrisoft dopo l'utilizzo.

Quando ho bisogno di risultati rapidi io

debrisoft®

Debrisoft® Duo 10 x 10 cm

- ideato per lo sbrigliamento di slough fibrinoso e ferite difficili
- il lato beige ruvido facilita il distacco dello slough fibrinoso saldamente adeso
- il lato bianco morbido rimuove detriti cellulari, essudato e biofilm dalla ferita
- si ha la possibilità di utilizzare uno o entrambi i lati del pad in base alle condizioni della ferita e alle necessità del paziente

Debrisoft® Lolly


- per lo sbrigliamento di ferite profonde e aree difficili da raggiungere
- fissaggio sicuro della testa in fibra (basso rischio di distacco improvviso della testa)
- ideale per ferite chirurgiche invasive

Debrisoft® Duo 13 x 20 cm

Progettato sulla base dell'esperienza degli utenti:

Molto efficace

Assorbe, lega e rimuove detriti cellulari, essudato e batteri.
Rimuove il 99% del biofilm*.

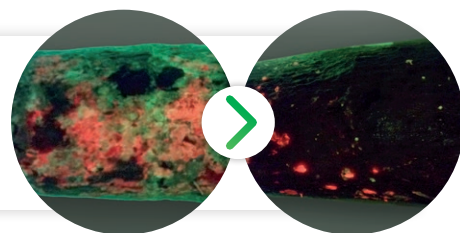

Fonte 1

Facile e sicuro da usare

Elevata soddisfazione degli utenti, risultati visibili rapidamente in 2-4 minuti.



Fonte 2

Adattabile alla situazione della ferita e alle necessità del paziente

Debrisoft Duo è stato sviluppato per consentire uno sbrigliamento più efficace dello slough fibrinoso saldamente adeso rispetto allo sbrigliamento meccanico standard.





La famiglia di prodotti Debrisoft® Tre opzioni – una soluzione.



Volete usare l'originale?
Qui trovate consigli utili.



Debrisoft® Duo

sterile, confezionato singolarmente

Misura (cm)	Codice	Pharmacode	UdV/TC (pz.)
10 x 10	159 990	1129723	5/50
13 x 20	159 991	1129724	5/50

Debrisoft® Lolly

sterile, confezionato singolarmente

Codice	Pharmacode	UdV/TC (pz.)
33 224	6392082	5/50

Si prega di leggere le istruzioni per l'uso.

Provate Debrisoft® Duo ora!
Per maggiore flessibilità
nello sbrigliamento.



Fonti:

- 1) Immagini: Foto utilizzate con il gentile consenso del paziente, Regno Unito.
- 2) Immagini: Gabriele Stern, ATZ-Stern, Bocholt, Germania.