

ReadyWrap®

La soluzione facile per la compressione in auto-cura.



Support for Life[✱]

ReadyWrap®, sistemi compressivi regolabili per pazienti con malattie venose e linfatiche delle braccia e delle gambe.



Sostenere i pazienti per tutta la vita con Ready Wrap®

Sistema modulare – gli elementi risultano efficaci sia da soli sia combinati insieme

Facile da usare, applicare e regolare^{3,4} anche per chi ha problemi di artrite alle mani³

Consente al paziente di curarsi in autonomia¹¹



Conveniente alternativa ai bendaggi grazie all'auto-cura¹¹

Consente di risparmiare tempo: riduce la necessità di visite cliniche¹¹



Compliance migliorata, ben tollerato dai pazienti⁴

Perché scegliere ReadyWrap®

I sistemi compressivi ReadyWrap® rendono facile raggiungere livelli di compressione clinicamente efficaci¹ e offrono supporto ai pazienti che devono gestire la loro condizione, non solo oggi, ma per tutta la vita.



ReadyWrap® è ottimale per i pazienti Facile utilizzo³, con chiusura VELCRO® con codice colore

- fasce di fissaggio anteriori corte che facilitano l'applicazione e la regolazione da parte del paziente^{3,4}
- le fasce sovrapposte riducono al minimo gli errori nell'applicazione da parte dell'utilizzatore e possono evitare l'eccessiva perdita di pressione se il paziente non applica perfettamente il prodotto¹
- Alternativa facile ed efficace alle calze compressive²
- tutti i prodotti sono disponibili in nero e beige



ReadyWrap® è clinicamente efficace Caratteristiche di corta estensibilità¹³, pressione di lavoro terapeutica efficace e pressione a riposo ben tollerabile

- esiti positivi per pazienti con ulcere delle gambe^{3,4,5} e linfedema⁴
- efficace nella gestione di tumefazione (edema) e ulcerazioni ricorrenti⁵
- eccellente indice di rigidità statica (SSI) compreso tra 16 e 23, simile ai bendaggi anelastici¹³
- le fasce con sovrapposizione del 50% garantiscono una copertura completa e possono essere adattate ai cambiamenti di circonferenza dell'arto per contenere e controllare l'edema^{4,5}



ReadyWrap® è conveniente ReadyWrap® consente un risparmio economico e inoltre⁷⁻¹¹:

- risparmio di tempo grazie all'applicazione più rapida e semplice del dispositivo in confronto ai bendaggi compressivi
- uso ridotto di materiali per i bendaggi, dato che ReadyWrap può essere lavato e riutilizzato per un periodo di sei mesi
- minor numero di visite cliniche grazie all'auto-cura a casa
- tempi di cura ridotti, perché può essere facilmente applicato dal paziente o dalla persona che lo assiste

ReadyWrap®

Aiuta a rendere più facile la vita di ogni giorno.

ReadyWrap® adotta un approccio olistico all'area terapeutica, offrendo supporto ai pazienti e agli operatori sanitari in ogni fase del decorso della compressione.

Ci concentriamo su una combinazione di trattamento clinico di successo, riduzione dei tempi e dei costi. L&R offre ai pazienti e agli operatori sanitari professionisti

Support for Life





“ReadyWrap® è così facile da usare per i pazienti che aiuta la nostra clinica a **ridurre il numero di sedute di trattamento** da 3 a 2 a settimana, e a **dimezzare i tempi di trattamento** rispetto al bendaggio standard. I miei pazienti possono riconquistare la propria indipendenza e noi possiamo tenere sotto stretto controllo i costi.”


Ellen,
terapista specializzata in cute ed edemi

“Per la terapia compressiva mi capita di dover visitare un paziente anche più volte alla settimana, il che non è conveniente. ReadyWrap® ci ha aiutato a **ridurre il tempo di cura**, e anche a **diminuire il gonfiore** a tal punto che il mio paziente potrebbe indossare gli stivali e tornare di nuovo in sella alla moto.”

Robert,
infermiere comunitario



- 1 le fasce anatomiche si adattano all'arto fornendo sostegno e comfort per la gamba
- 2 grazie alla innovativa cucitura centrale sulla parte posteriore⁴, si riduce la deformazione nella zona del polpaccio e la fasciatura mantiene la sua forma
- 3 le chiusure in VELCRO® con codice colore facilitano l'applicazione⁴

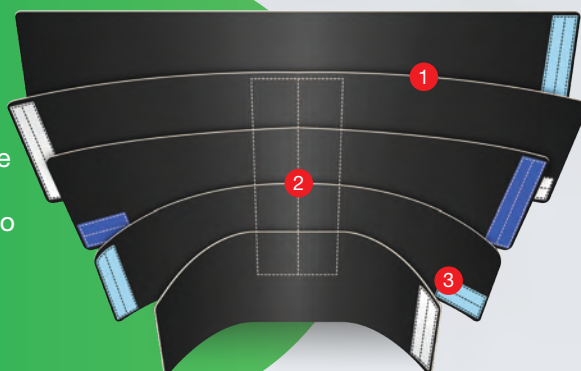


Nota: ogni elemento ReadyWrap per la gamba, tranne ReadyWrap Dita dei piedi, viene fornito con una sottocalza. Le sottocalze sono progettate per essere utilizzate sotto i sistemi compressivi ReadyWrap.

ReadyWrap®

Sistemi compressivi della gamba.

Fasce corte con
codice colore

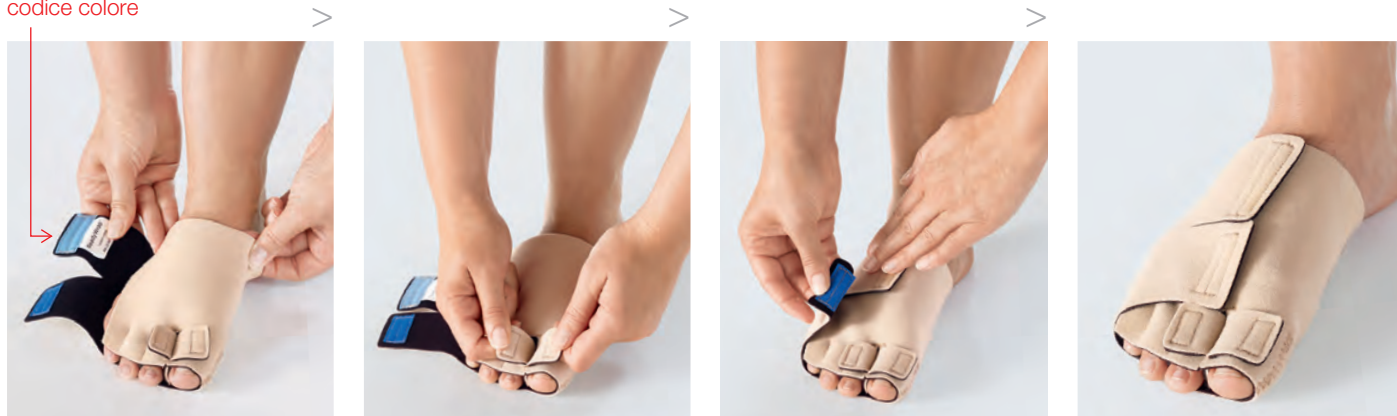

ReadyWrap® Toes

- il design innovativo permette un adattamento individuale alla circonferenza delle dita dei piedi
- in combinazione con l'elemento ReadyWrap Foot CT, permette una copertura dell'intero piede
- il diverso design per il piede destro e sinistro ottimizza la calzata

ReadyWrap® Foot CT

- versione specifica per destra/sinistra, 2 lunghezze e taglia XXL
- le fasce a strappo regolabili avvolgono in modo confortevole il dorso del piede e della caviglia, ideale per edema da moderato a grave
- offre maggiore contenimento per il gonfiore del dorso del piede
- progettato per contenere e avvolgere senza lasciare punti scoperti



ReadyWrap®

Sistemi compressivi della gamba.



ReadyWrap® Calf

- può essere indossato con calze compressive per un ulteriore sostegno e protezione
- la cucitura centrale sul lato posteriore riduce la deformazione nella zona posteriore e migliora la tenuta di ReadyWrap
- sovrapporre ReadyWrap Foot CT e Knee in modo da avere una copertura completa



ReadyWrap® Thigh

- caratteristiche di allungamento limitato, pressione di lavoro terapeutica efficace e pressione a riposo ben tollerata e leggera dal ginocchio all'inguine
- la fascia superiore favorisce un ottimale adattamento a cosce dritte e coniche
- sovrapporre ReadyWrap Knee in modo da avere una copertura completa



ReadyWrap® Knee

- facile da usare, le tre fasce provvedono un eccellente comfort, riducendo il rischio di costrizioni e punti di pressione
- sovrapporre ReadyWrap Calf e Thigh in modo da avere una copertura completa

ReadyWrap® Extender Strap



- allunga la fascia standard ReadyWrap di circa 10 cm
- la linguetta a Y sull'estremità della fascia permette un fissaggio sicuro
- abbinabile con ReadyWrap Calf, Knee e Thigh

ReadyWrap® Liner



- da usare sotto ReadyWrap per proteggere la cute e per il fissaggio delle medicazioni (i sottocalza stessi non esercitano alcuna compressione terapeutica)
- elastico e liscio al tatto, conserva ancora meglio la forma dopo essere stato indossato
- disponibile nella versione gambaletto o calza coscia

- 1 le fasce anatomiche si adattano all'arto fornendo sostegno e comfort per il braccio
- 2 manica interna del braccio per un adattamento corretto
- 3 le chiusure con VELCRO® con codice colore facilitano l'applicazione



ReadyWrap®

Sistemi compressivi del braccio.



ReadyWrap® Arm

- la manica interna a doppia cucitura consente di indossarlo e rimuoverlo facilmente con una sola mano
- l'imbottitura nella zona del polso e del gomito elimina i punti di pressione e fornisce ulteriore comfort
- utilizzabile per il braccio destro e sinistro

ReadyWrap® Gauntlet

- copre polso e mano
- la diversa progettazione per la destra e la sinistra rispetta la naturale posizione della mano. Le imbottiture integrate sul palmo e il dorso delle mani forniscono pressione uniforme anche sulle prominenze ossee
- le tasche integrate possono accogliere ulteriore imbottitura per un sostegno supplementare
- sovrapporre ReadyWrap Arm per avere una copertura completa



ReadyWrap®

Misurazione della gamba.

Come misurare la gamba:

chiedere al paziente di stare in piedi, se possibile.
Contrassegnare e misurare la gamba come segue:

Punti della circonferenza:


cG 2 cm sotto la piega glutea
cE' 5 cm sopra il ginocchio
cD 2-3 cm sotto la fossa poplitea
cC circonferenza massima del polpaccio
cB 2 cm sopra il malleolo
cA' circonferenza massima del dorso del piede
cA intorno alla base delle dita dei piedi

Lunghezze:

IA-Y dal tallone alla base delle dita dei piedi
ID-B la distanza fra il punto cB (2 cm sopra il malleolo) e il punto cD (2 cm sotto la fossa poplitea)
IG-E' la distanza fra il punto cE' (5 cm sopra il ginocchio) e il punto cG (2 cm sotto la piega glutea)

Note:

c = circonferenza, l = lunghezza
Tutte le misure di lunghezza devono essere perpendicolari e seguire i contorni del corpo. Tutte le misure si intendono in centimetri.

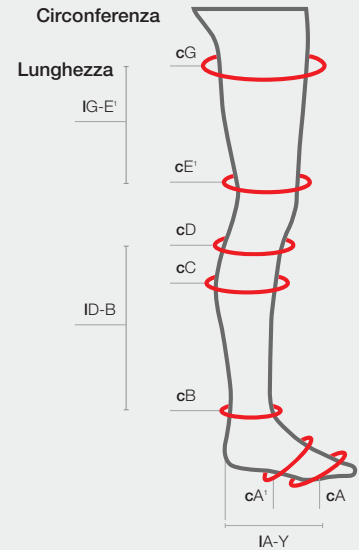

	S	M	L	XL	XXL
ReadyWrap® Thigh					
(IG-E')	Circonferenza dell'inguine (cG) 48-63 cm Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 38-48 cm	Circonferenza dell'inguine (cG) 58-73 cm Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 45-58 cm	Circonferenza dell'inguine (cG) 68-83 cm Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 52-68 cm	Circonferenza dell'inguine (cG) 78-93 cm Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 59-78 cm	Circonferenza dell'inguine (cG) 88-103 cm Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 66-88 cm
■ Beige fino a 25 cm	104478	104474	104470	104482	104790
■ Nero fino a 25 cm	104479	104475	104471	104483	104791
■ Beige fino a 30 cm	104480	104476	104472	104484	104792
■ Nero fino a 30 cm	104481	104477	104473	104485	104793

ReadyWrap® Knee					
(misura unica – 20 cm)	Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 38-48 cm Circonferenza sotto il ginocchio (cD) 28-38 cm	Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 45-58 cm Circonferenza sotto il ginocchio (cD) 33-43 cm	Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 52-68 cm Circonferenza sotto il ginocchio (cD) 38-48 cm	Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 59-78 cm Circonferenza sotto il ginocchio (cD) 43-58 cm	Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 66-88 cm Circonferenza sotto il ginocchio (cD) 53-68 cm
■ Beige	104464	104462	104460	104466	104788
■ Nero	104465	104463	104461	104467	104789

ReadyWrap® Calf					
(ID-B)	Circonferenza del polpaccio (cC) 28-38 cm Circonferenza della caviglia (cB) 18-23 cm	Circonferenza del polpaccio (cC) 33-43 cm Circonferenza della caviglia (cB) 20-28 cm	Circonferenza del polpaccio (cC) 38-48 cm Circonferenza della caviglia (cB) 25-33 cm	Circonferenza del polpaccio (cC) 43-58 cm Circonferenza della caviglia (cB) 30-38 cm	Circonferenza del polpaccio (cC) 53-68 cm Circonferenza della caviglia (cB) 35-43 cm
■ Beige fino a 30 cm	104450	104446	104442	104454	104784
■ Nero fino a 30 cm	104451	104447	104443	104455	104785
■ Beige fino a 35 cm	104452	104448	104444	104456	104786
■ Nero fino a 35 cm	104453	104449	104445	104457	104787

ReadyWrap® Foot CT					
(IA-Y)	Circonferenza della caviglia (cB) 18-23 cm Circonferenza (cA) 18-20,4 cm Circonferenza (cA') 20-25 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 20-28 cm Circonferenza (cA) 20,5-23,5 cm Circonferenza (cA') 24-29 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 25-33 cm Circonferenza (cA) 23,6-26 cm Circonferenza (cA') 28-33 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 30-38 cm Circonferenza (cA) 26,1-28,5 cm Circonferenza (cA') 32-37 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 35-43 cm Circonferenza (cA) 28,6-31 cm Circonferenza (cA') 36-41 cm
Destro ■ Beige Reg 16-19 cm	141727	141731	141735	141739	141743
Destro ■ Nero Reg 16-19 cm	141729	141733	141737	141741	141745
Sinistro ■ Beige Reg 16-19 cm	141726	141730	141734	141738	141742
Sinistro ■ Nero Reg 16-19 cm	141728	141732	141736	141740	141744
Destro ■ Beige Lungo 19-22 cm	141747	141751	141755	141759	141763
Destro ■ Nero Lungo 19-22 cm	141749	141753	141757	141761	141765
Sinistro ■ Beige Lungo 19-22 cm	141746	141750	141754	141758	141762
Sinistro ■ Nero Lungo 19-22 cm	141748	141752	141756	141760	141764

ReadyWrap® Toes					
(cA)	Circonferenza (cA) 18,0-20,4 cm	Circonferenza (cA) 20,5-23,5 cm	Circonferenza (cA) 23,6-26,0 cm	Circonferenza (cA) 26,1-28,5 cm	Circonferenza (cA) 28,6-31,0 cm
Destro ■ Beige	104416	104414	104412	104418	104420
Destro ■ Nero	104417	104415	104413	104419	104421
Sinistro ■ Beige	104406	104404	104402	104408	104410
Sinistro ■ Nero	104407	104405	104403	104409	104411

ReadyWrap® Extender Strap Taglia unica	
■ Beige	104740
■ Nero	104741

ReadyWrap® Liner in paia, disponibile solo in nero		
	Small – Large	X-Large – XX-Large
	Circonferenza della caviglia (cB) 18-33 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 30-43 cm
	Circonferenza del polpaccio (cC) 28-48 cm	Circonferenza del polpaccio (cC) 43-68 cm
	Circonferenza dell'inguine* (cG) 48-83 cm	Circonferenza dell'inguine* (cG) 78-103 cm
Calza al ginocchio ■ Nero	149032	149033
Calza alla caviglia ■ Nero	149034	149035

* necessario solo per ordinare la calza alla caviglia

ReadyWrap®

Misurazione del braccio.

Come misurare il braccio:

misurare il braccio in posizione sostenuta e rilassata con il gomito leggermente flesso. I punti di misurazione si riferiscono ai seguenti punti di repere anatomici:

Punti della circonferenza:


- cA** massima larghezza del palmo della mano, appena sotto le articolazioni metacarpofalangee
- cC** circonferenza minima del polso sull'articolazione del gomito, nella piega del gomito
- cG** parte superiore del braccio, appena sotto la piega ascellare

Lunghezze:

- IA-C** la distanza tra il punto **cA** (sulla circonferenza massima del palmo della mano, appena sotto le articolazioni metacarpofalangee) e il punto **cC** (sulla circonferenza minima del polso)
- IC-G** la distanza tra il punto **cC** (circonferenza minima del polso) e il punto **cG** (parte superiore del braccio, appena sotto la piega ascellare)

Note:

- c** = circonferenza, **I** = lunghezza
- Tutte le misurazioni della lunghezza devono seguire il contorno del corpo.
- Tutte le misure si intendono in centimetri.

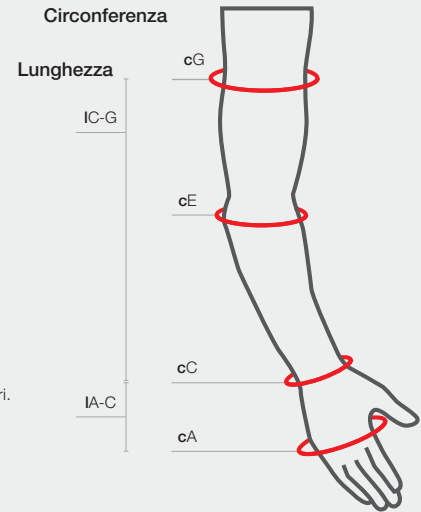

	S	M	L	XL
ReadyWrap® Arm				
(IC-G) (3 x lengths)	Circonferenza dell'ascella (cG) 22-29 cm Circonferenza del gomito (cE) 19-26 cm Circonferenza del polso (cC) 13,5-17 cm	Circonferenza dell'ascella (cG) 26-36 cm Circonferenza del gomito (cE) 24-33 cm Circonferenza del polso (cC) 15,5-20 cm	Circonferenza dell'ascella (cG) 31-43 cm Circonferenza del gomito (cE) 29-40 cm Circonferenza del polso (cC) 17,5-23 cm	Circonferenza dell'ascella (cG) 36-50 cm Circonferenza del gomito (cE) 30-43 cm Circonferenza del polso (cC) 17,5-23 cm
Corta				
■ Beige fino a 43 cm	104514	104508	104502	104520
■ Nero fino a 43 cm	104515	104509	104503	104521
Media				
■ Beige fino a 46 cm	104516	104510	104504	104522
■ Nero fino a 46 cm	104517	104511	104505	104523
Lunga				
■ Beige fino a 49.5 cm	104518	104512	104506	104524
■ Nero fino a 49.5 cm	104519	104513	104507	104525
ReadyWrap® Gauntlet				
	Lunghezza (IA-C) up to 12,5 cm Circonferenza del polso (cC) 13,5-17 cm Circonferenza del palmo (cA) 18-20 cm	Lunghezza (IA-C) up to 13,5 cm Circonferenza del polso (cC) 15,5-20 cm Circonferenza del palmo (cA) 20-22 cm	Lunghezza (IA-C) up to 14,5 cm Circonferenza del polso (cC) 17,5-23 cm Circonferenza del palmo (cA) 22-24 cm	Lunghezza (IA-C) up to 15,5 cm Circonferenza del polso (cC) 19,5-26 cm Circonferenza del palmo (cA) 24-26 cm
Destro ■ Beige	104498	104496	104494	104500
Destro ■ Nero	104499	104497	104495	104501
Sinistro ■ Beige	104490	104488	104486	104492
Sinistro ■ Nero	104491	104489	104487	104493

ReadyWrap®

Informazioni per l'utilizzatore.

Prima del trattamento effettuare una visita generale e un controllo della situazione vascolare. Attenersi alle linee guida locali e nazionali.

Indicazioni

Sistema compressivo per indicazioni flebologiche e linfatiche, per esempio patologie venose, edemi cronici e linfedemi.

Per ridurre o mantenere la circonferenza e la forma delle estremità superiori e inferiori.

Misure precauzionali

Con un valore ABPI (Ankle-Brachial Pressure Index, indice pressorio caviglia/braccio) <0,8 il trattamento compressivo deve essere eseguito solo sotto stretto controllo di uno specialista vascolare.

Il dispositivo non è adatto per una circonferenza della caviglia minore di 18 cm, a meno che tale circonferenza non venga aumentata con l'aiuto di materiale per imbottitura fino ad arrivare a 18 o più centimetri.

Il sistema compressivo ReadyWrap potrebbe non essere appropriato per l'utilizzo in presenza di ferite fortemente essudanti o di grandi dimensioni.

Come in tutti i sistemi compressivi è necessaria prudenza, quando

- si sospetta la presenza di sovraccarico cardiaco
- il paziente è diabetico
- il paziente ha una patologia avanzata dei piccoli vasi sanguigni
- è presente arteriopatia
- è presente insufficienza renale
- è presente artrite reumatoide

Se dopo l'applicazione si riscontra dolore, pallore cutaneo o sensazione di insensibilità all'estremità interessata, il sistema compressivo deve essere immediatamente rimosso.

Controindicazioni

- insufficienza arteriosa o ABPI <0,8
- trombosi venosa profonda acuta
- insufficienza cardiaca scompensata non trattata
- cancro non trattato
- infezione non trattata, per esempio cellulite
- allergia ai materiali costituenti il prodotto
- arteriopatia periferica grave o moderata

Istruzioni per la cura di ReadyWrap

Informazioni generali

- utilizzare con cura e delicatezza per evitare la rottura del filato
- non utilizzare i prodotti in caso di eritema, sensazione di intorpidimento o alterazioni del colore cutaneo

Lavaggio

- lavare a mano in acqua calda con poco detersivo per capi delicati
- sciacquare accuratamente con acqua calda
- NON utilizzare candeggina o ammorbidente

Asciugatura

- asciugare in posizione orizzontale
- non mettere in asciugatrice e non stirare
- il tempo di asciugatura può essere ridotto ponendo l'elemento sopra una salvietta e arrotolando entrambi per raccogliere l'acqua in eccesso
- assicurarsi che la chiusura in VELCRO® non sia a contatto con la salvietta

Materiali

- ReadyWrap utilizza una chiusura in VELCRO®. Contiene un sistema di aggancio comunemente chiamato "VELCRO®"
- non fabbricato con lattice di gomma naturale
- la composizione del materiale di ReadyWrap è:
 - ◆ 61% nylon
 - ◆ 33% poliuretano
 - ◆ 6% elastan (spandex)

Support for Life⁺

Riteniamo che i medici e i pazienti che gestiscono disturbi vascolari e linfatici debbano avere facile accesso a trattamenti e consigli appropriati e clinicamente efficaci, al fine di sentirsi supportati non solo nel momento di necessità ma per sempre.

Per saperne di più visitate

www.SupportforLife.com



Servizio clienti

Lohmann & Rauscher vi offre una soluzione semplice per la compressione in autocura.

Se avete domande, avete bisogno di ulteriori informazioni o desiderate effettuare un ordine, contattate il nostro servizio clienti, dal lunedì al venerdì:

Lohmann & Rauscher s.r.l.

Via E.P. Masini 2 · IT-35131 Padova

info@it.LRmed.com · +39 (0) 49 744 66 35

Per ulteriori informazioni visitate

www.Lohmann-Rauscher.com

Fonti:

- 1) Ehmann, S; Bock, K. (2017). Critical evaluation of bandage alternative characteristics: a case series. EWMA Conference, Amsterdam, Netherlands.
- 2) Blecken, S., Villavicencio, J.L., Kao, T. (2005). Comparison of elastic versus nonelastic compression in bilateral venous ulcers: a randomized trial. J Vasc Surg.
- 3) Hampton, S. (2016). The difficulty and the solution of compression therapy in a healed venous leg ulcer. Br J Community Nursing, 21(9), p34–p38.
- 4) Ehmann, S. (2016). Multinational, pilot audit of a VELCRO adjustable compression wrap system for venous and lymphatic conditions. JWC, 25(9), p513–p520.
- 5) Bock, K.J. (2016). Adjustable compression wraps can prevent ulcer re-occurrence in phlebo-lymphedema; a case series. Poster presentation, SAWC, Austin 2016.
- 6) Guest, J.F; Ayoub, N; McIlwraith, T. et al. (2015). Health economic burden that wounds impose on the National Health Service in the UK. BMJ, Open 5: e00w9283. doi:10.1136/bmjopen-2015-009283.
- 7) Elvin, S. Cost efficacy of using Juxta CURES™ and UCS™ debridement cloths. Journal of Community Nursing, 2015; 29(2), p25–p28.
- 8) Wigg, J; Lee, N. Redefining essential care in lymphoedema. Br J Community Nursing, 2014; 19: Chronic Supple, p24–p29.
- 9) Bianchi, J; Mahoney, K; Nugent, L; Kenn, D. A fresh way to treat venous leg ulcers with measured compression. Br J Community Nursing 2013; 18(4), Suppl, p34–p40.
- 10) Nugent, L. Juxta CURES™: compression for healing venous ulcers. Br J Community Nursing, 2013; 18(5), p40–p45.
- 11) Ellen Kuijper-Kuip, Skin and edematherapist – MediSkin – Total Skin Care; Jeanette Muldoon, Activa Healthcare Ltd., L&R UK. Meeting the practical and economic challenges of managing skin and wounds using self-care as an option for patients with lymphedema. Annual Meeting of the European Wound Management Association (EWMA), Amsterdam, 3–5 May 2017.
- 12) Rabe, E.; Pannier-Fischer, F.; Bromen, K.; Schuldt, K.; Stang, A.; Poncar, Ch.; Wittenhorst, M.; Bock, E.; Weber, S. & Jöckel, K. H. (2003). Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Phlebologie, 32(1), p1–p14.
- 13) Muldoon, J.; Hampton, S. (2017). Validity, Inter-rater and Intra-rater reliability of an Adjustable Compression Device Application, SAWC, San Diego 2017.