

Rosidal® soft onderlaag (schuimzwachtel)



- Zet de voet in een hoek van 90 graden. Start met een circulaire toer boven op de voet, begin bij de kleine teen. Bij grote voeten zijn eventueel 2 slagen nodig.




- Draai de schuimzwachtel over de enkel heen, zodanig dat het midden van de zwachtel het enkelgewricht bedekt. De onderkant van de hiel wordt niet ingepakt.



- Draai de schuimzwachtel met minimale overlap circulair naar boven, tot twee vingers onder de knie. Gebruik net voldoende spanning om de contouren van het been te volgen. Knip overtollig materiaal af en fixeer met een pleister.

Rosidal® haft bovenlaag (cohesieve korte rek zwachtel)

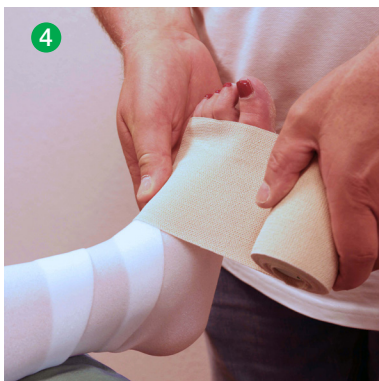


- Zet de voet in een hoek van 90 graden. Start met een circulaire toer boven op de voet, te beginnen bij de kleine teen. Bij grote voeten zijn eventueel 2 slagen nodig. Houd continu optimale spanning op de rol.



- Vervolg met 2 slagen om de hiel in te pakken. De eerste toer 1/3 om de hiel en 2/3 om de achillespees. De 2e tour 1/3 om de hiel en 2/3 om de voet. Houd continu optimale spanning op de rol.



- Sla nu één toer om de enkel en draai vervolgens de compressiezwachtel met 50% overlap circulair naar boven, tot twee vingers onder de knie. Houd continu optimale spanning op de rol.

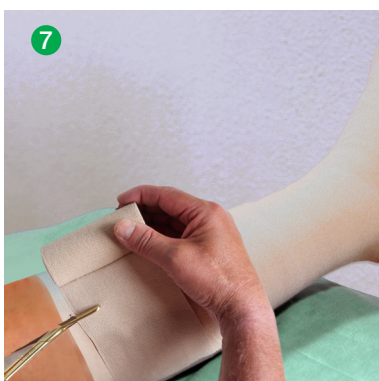

- Knip zo nodig overtollig materiaal af en fixeer eventueel met een pleister.



- Druk de Rosidal® haft goed aan om deze volledig te fixeren.



People.Health.Care.

Rosidal® haft Cohesieve korte rek zwachtel

5 m (uitgerekte lengte)

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index nr.
niet-steriel, individueel in vouwdoos		
6 x 5	31973	16024443
8 x 5	31974	16024451
10 x 5	31975	16024478
12 x 5	31976	16024486
steriel, afzonderlijk verpakt		
8 x 5	31970	16024419
10 x 5	31971	16024427
12 x 5	31972	16024435

Rosidal® soft Schuimverband

2,0 m (ongerekte lengte), met verbandhaakjes

Dikte (cm)	Afmetingen (cm x m) per paar in vouwdoos	REF	Z-Index nr.
0,2	10 x 2	13016	15572080
2,5 m (ongerekte lengte), met verbandhaakjes			
0,3	10 x 2,5	23110	14925869
0,4	10 x 2,5	23111	14925877
0,4	12 x 2,5	23112	14925885
0,4	15 x 2,5	23113	14925893