



People.Health.Care.



Advieskaart




Rosidal® TCS compressiesysteem

zwachtelen met een tweelaags zwachtelsysteem

Product	Artikelnr.	Z-Index nr.
Rosidal TCS compressiesysteem 2 componenten	26 484	158 148 23
Rosidal TCS Soft compressiebandage aanvulling	33 503	158 208 23
Rosidal TCS cohesief compressiebandage aanvulling	33 499	158 208 31

Toepassingsgebieden	Eigenschappen	Opmerkingen
<ul style="list-style-type: none"> ■ geïndiceerd voor cliënten met een enkel-arm-index vanaf 0,5 en hoger ■ oedeem, lymfoedeem, trombose, lipolymfoedeem, na invasieve behandeling spataderen ■ kneuzingen voet en/of trauma (sportblessure) ■ voor het behandelen van een open been en gerelateerde aandoeningen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ de verbanden hebben een zeer lage rustdruk door de hoge stiffness. Hierdoor is veilige behandeling bij een enkel-arm-index tussen 0,5 en 0,8 onder toezicht mogelijk ■ twee componenten, gebruiksklaar en handig gecombineerd in een set ■ cohesieve tweede laag ■ past moeiteloos in de schoen ■ zakt niet af 	<ul style="list-style-type: none"> ■ het systeem is bedoeld voor eenmalig gebruik ■ therapeutische druk blijft meerdere dagen behouden ■ aanleggen onder volledige spanning (Safe-Loc) ■ latexvrij



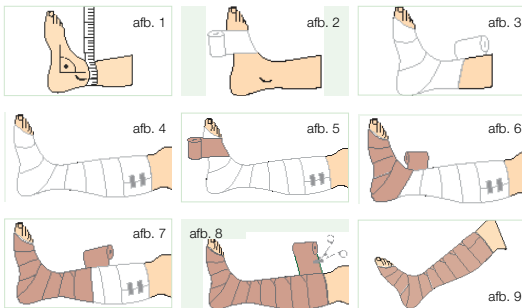

Aanbrenginstructies:

- kijk in de rol. Het opgerolde deel van het verband (verbandrol) moet naar buiten wijzen
- leid de verbandrol dicht langs het been
- breng de beide compressieverbanden altijd onder volledige spanning aan (maximale rek = Safe-Loc)

- 1 Meet de enkelomtrek. Indien enkelomtrek kleiner is dan 18 cm vergroot de omtrek met polstermateriaal (nr. 1). Zorg ervoor dat de voet en hiermee het enkelgewricht in een rechte hoek (90°) ligt om een maximale beweging van het gewricht te behouden (afb. 1).
- 2 Breng het compressieverband met polstering onder volledige spanning aan met twee circulaire slagen om

de voetwortel (afb. 2), neem de hiel mee (afb. 3) en ga met ongeveer 50% overlap over op het been tot circa 2 cm onder het fibulakopje. Knip het overtollige verbandmateriaal af en fixeer het uiteinde (afb. 4).

- 3 Alvorens het cohesieve compressieverband (nr. 2) aan te brengen, zorgt u ervoor dat de voet in een rechte hoek (90°) ligt om een maximale beweging van het gewricht te behouden. Breng het cohesieve compressieverband net als de eerste verbandlaag onder volledige spanning aan, om te beginnen met twee circulaire slagen om de voetwortel. Rol het compressieverband onder volledige spanning (Safe-Loc) af over de rug van de voet. Bij een lange voet kunt u een extra circulaire slag om het midden aanbrengen (afb. 5).
- 4 Rol het verband (in visgraatverband) (afb. 6) over het been. Zorg ervoor dat u het verband onder volledige spanning aanbrengt. Ga op dezelfde wijze verder (afb. 7).
- 5 Breng deze verbandlaag aan tot circa 3 cm onder het fibulakopje. Knip het overtollige verbandmateriaal af (afb. 8) en fixeer het uiteinde indien nodig met pleisters. Zorg ervoor dat de lagen aan elkaar blijven zitten.
- 6 Het verband is aangelegd (afb. 9).