


# Curaplast® vochtbestendige Strips NEW

Transparente en waterdichte wondverbanden, die aan de wond niet kleven. Individueel verpakt in onbedrukt papier met aparte uittrekopening.

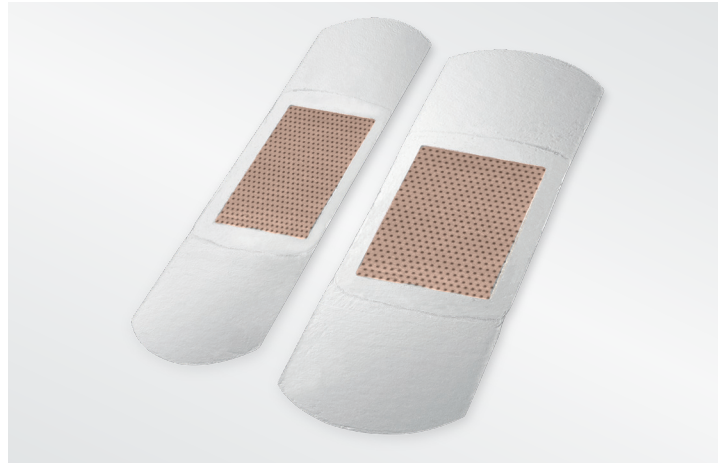

## Toepassingsgebieden

- Eerstehulpproduct voor absorptie van exsudaat en vloeistoffen, compressie en bescherming van wonden en wondoppervlakken.

## Aanbrengen

- De wond en de wondranden grondig reinigen.
- De huid volledig afdrogen. Verwijderen de schudbladen van de wondzijde en plakken de pleister op de huid door stevig op de randen te drukken.
- De bovenste beschermingslaag in de richting van de pijlen verwijderen.
- Het verband indien nodig vervangen, ten minste dagelijks

## Eigenschappen

- 100% vochtwerend
- luchtdoorlatend
- goede flexibiliteit
- hecht stevig en nauwsluitend
- geschikt voor zwemmen en baden

## Productsamenstelling

Steunlaagmateriaal: transparent folie (geen perforatie)

Wondkussen : crème, non woven kompres, gedekt met een niet adhesieve film om aan de wond niet te kleven.

## Curaplast® vochtbestendige Strips

Aantal	Composants	Maat (cm)	Wondkussen (cm)	Vorige REF	Nieuwe REF	VE (stk)
<b>20 stuks in vouwdoos, afzonderlijk individueel verpakt in onbedrukt papier met aparte uittrekopening. .</b>						
12	Strips	2.5 x 7.2	1.5 x 2.5	17 084	145 150 z-index : 17179459	1 / 30
8	Strips	1.9 x 7.2	1.1 x 2.5			