

## Curapor<sup>®</sup> chirurgisch wondverband



### Uw voordelen


- beschermt de wond
- blijft langer zitten door nieuw ontwerp
- eenvoudig aan te brengen

### Toepassing

- postoperatieve, acute en oppervlakkige wonden
- scheur- en snijwonden
- licht tot matig exsuderende wonden

## Curapor® chirurgisch wondverband

- A** zacht, soepel non-woven van 100 % polyester
- B** betrouwbare hechting door nieuwe kleefstof\*
- C** eenvoudig aan te brengen door gevouwen vleugels
- D** wondkussen met wondcontactlaag vermindert de wondverkleving
- E** afgeronde hoeken zodat het verband beter blijft zitten

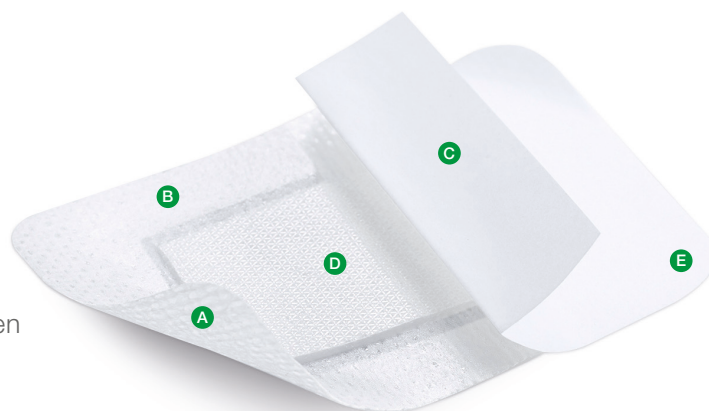

### Gebruiksaanwijzingen



**Stap 1**  
Open de buitenverpakking met het treklijpje.



**Stap 2**  
Pak beide gevouwen vleugels vast en trek het afdekpapier gelijkmatig uit elkaar.



**Stap 3**  
Leg het wondkussen op de gereinigde wond en verwijder het afdekpapier in zijn geheel.



**Stap 4**  
Druk de kleeftand zacht vast.

### Bestelinformatie

#### Curapor® chirurgisch wondverband, steriel

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm x cm)	REF	Z-Index	CNK	VE (stuks)
7 x 5	4 x 2,5	32 912	14032945	3178 316	100/600
10 x 8	6 x 4	32 913	14032953	3178 308	50/300
10 x 15	5 x 11	32 914	14032961	3178 290	50/300
10 x 20	5 x 16	32 915	14032988	3178 282	50/450
10 x 25	5 x 20	32 916	14032996	3178 274	50/250
10 x 30	5 x 25	32 917	14033003	3178 266	50/250
10 x 34	5 x 29	32 918	14927209	3178 258	50/300
7 x 5	4 x 2,5	32 902	15061671	3183 407	5/100
10 x 8	6 x 4	32 903	15061698	3183 399	5/100

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf  
 Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien  
 Laboratoires Lohmann & Rauscher s.a. · Rue Visé-Voie 81, Boîte 2 · B-4000 Liège-Rocourt  
 Lohmann & Rauscher B.V. · Antennestraat 86-B · NL-1322 AS Almere

\*Getest op PA-platen (data on file).