


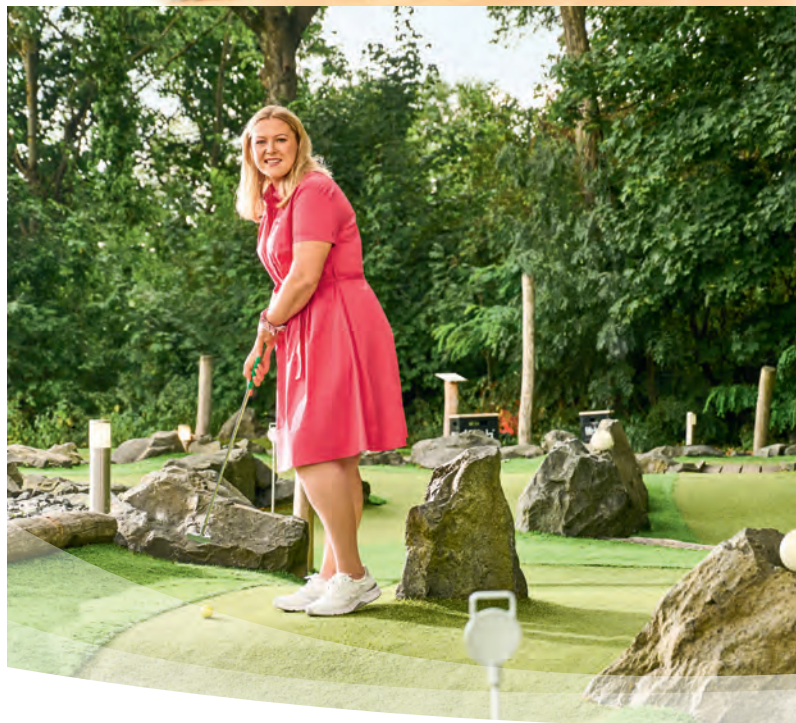

People.Health.Care.

VENOSAN® rondgebreide compressiekousen.

Oplossingen voor
lichtere benen.







Wat is VENOSAN®?

Al decennialang loopt een visie als een rode draad door onze bedrijfsgeschiedenis. Die visie is om voor alle relevante medische indicaties en levenssituaties de perfecte compressiekousen te kunnen leveren.

Met onze VENOSAN-kwaliteitsproducten kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie en behandeling van veneuze aandoeningen, van zowel vrouwen als mannen.

Simpel. Effectief.

VENOSAN-compressiekousen maken het leven gemakkelijker in vele situaties. De benodigde therapeutische druk die de compressiekousen uitoefenen, bevordert gezonde aderen. Zo bieden ze enerzijds profylactische preventie van veneuze ziekten, en anderzijds zijn ze een essentieel onderdeel van de behandeling van acute en chronische veneuze aandoeningen.

Het gevarieerde VENOSAN-assortiment biedt het juiste product voor de meest uiteenlopende behoeften. Alle VENOSAN-compressiekousen hebben deze eigenschappen gemeen:

Simpel.

In het VENOSAN-assortiment vindt u een eenvoudige handleiding waarmee u de juiste maat, compressieklasse en uitvoering van de betreffende compressiekous kunt bepalen.

Klanten waarderen het ook dat de kousen eenvoudig aan te trekken zijn.

Effectief.

VENOSAN staat voor effectiviteit. De RAL-gecertificeerde compressiekousen garanderen de therapeutisch noodzakelijke compressiegradiënt.

Snel behandelsucces en een betere levenskwaliteit zijn het resultaat van dit doelgerichte, effectieve productontwerp.

Compressiekousen voor de onderste extremiteiten in één oogopslag.



VENOSAN® 4000

CLIMATE EFFECT



Comfortabel te dragen, vanaf het moment dat u ze aantrekt.

De constructie van het breiwerk van microvezels in de VENOSAN 4000-compressiekousen zorgt ervoor dat ze licht en aangenaam aanvoelen.

De compressiekousen bieden optimale ondersteuning voor dagelijks gebruik. Geschikt voor zowel dames als heren en ideaal om te dragen tijdens de zwangerschap.

Microvezels – fijn en stijlvol.

■ Voor een aangenaam draagklimaat

Met een verfijnde sandwichconstructie is de VENOSAN 4000 de eerste compressiekous met het TACTEL-label voor een aangenaam draagklimaat. Hierdoor zijn de kousen comfortabel te dragen.

■ Uitermate elastisch

Door nieuwe technologie is de sterkte/stretch-curve veel platter. De kousen zijn bijzonder eenvoudig aan en uit te trekken.

■ Comfortabel

Het materiaal van topkwaliteit staat garant voor hoog draagcomfort.

Standaardstijlen:




Indicaties

- Chronische veneuze insufficiëntie (CVI) 1
- Zwangerschapsvarices
- Mildere symptomen
- Na veneuze operaties

Materiaalsamenstelling

- 71% Tactel®-polyamide
- 29% Elastaan

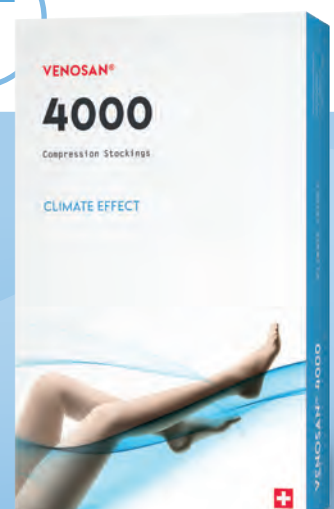

Maattabel en meetpunten VENOSAN® 4000

Confectietabel VENOSAN® 4000

rondbrei beenkousen


Maat (cm)	Small	Medium	Large	X-Large
cG	48-63	54-67	58-72	63-74
cD	28-38	32-41	35-44	38-46
cC	29-39	33-42	36-45	39-47
cB	20-23	23-26	26-29	29-31

Lengte (cm)	Kort	Lang
IG	63-72	68-78
ID	35-40	37-42

Confectie assortiment

- AD met en zonder 3 cm siliconen noppenboord
- AG met siliconen noppenboord of kanten zelfklevende band
- Open en gesloten teenstuk

- Kleuren:
Zwart
Mexico
Antraciet
Marine blauw

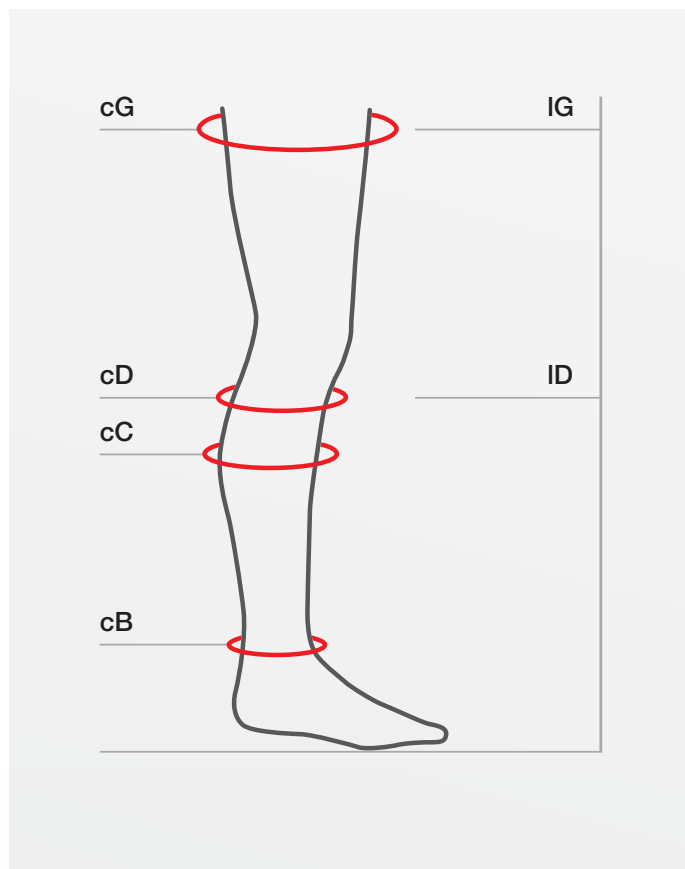

AD gesloten teenstuk, beige



AG met siliconen noppenboord,
open teenstuk



AG met kanten zelfklevende band



VENOSAN® 6000 CLASSIC



Kosteneffectief en betrouwbaar.

De VENOSAN 6000 Classic is een medische compressiekous met matige compressiesterkte. Als medisch basishulpmiddel voldoen de kousen als effectieve, doelgerichte behandeling van lichte tot matige veneuze indicaties. Door de keuze voor klassieke garens en de duurzame gebreide constructie zijn ze een uitstekende kosteneffectieve oplossing om therapeutisch effectieve compressie te bereiken.

■ Kosteneffectief

Goedkope kous die desondanks aan alle eisen voldoet.

■ Gebruiksgemak

Kan op 40°C op een fijnwasprogramma in de wasmachine worden gewassen. Droogt op natuurlijk wijze binnen één nacht op.



Standaardstijlen:



Indicaties

- Chronische veneuze insufficiëntie (CVI) 1
- Varices
- Zwangerschapsvarices
- Na veneuze operaties

Materiaalsamenstelling

- 70% Nylonpolyamide
- 30% Elastaan



Maattabel en meetpunten VENOSAN® 6000

Confectietabel VENOSAN® 6000

rondbrei beenkousen

Maat (cm)	X-Small*	Small	Medium	Large	X-Large
cG	44-59	49-63	54-66	58-70	63-74
cD	26-35	29-38	32-40	35-43	38-46
cC	27-36	30-39	33-41	36-44	39-47
cB	16-19	20-22	23-25	26-28	29-31


*alleen verkrijgbaar zonder siliconenboord

Lengte (cm)	Kort	Lang
IG	59-67	68-78
ID	34-39	39-44

Confectie assortiment

- AD met en zonder 3 cm siliconen noppenboord
- AG met 5 cm siliconen noppenboord
- Open en gesloten teenstuk

- Kleuren:
- Beige
- Zwart

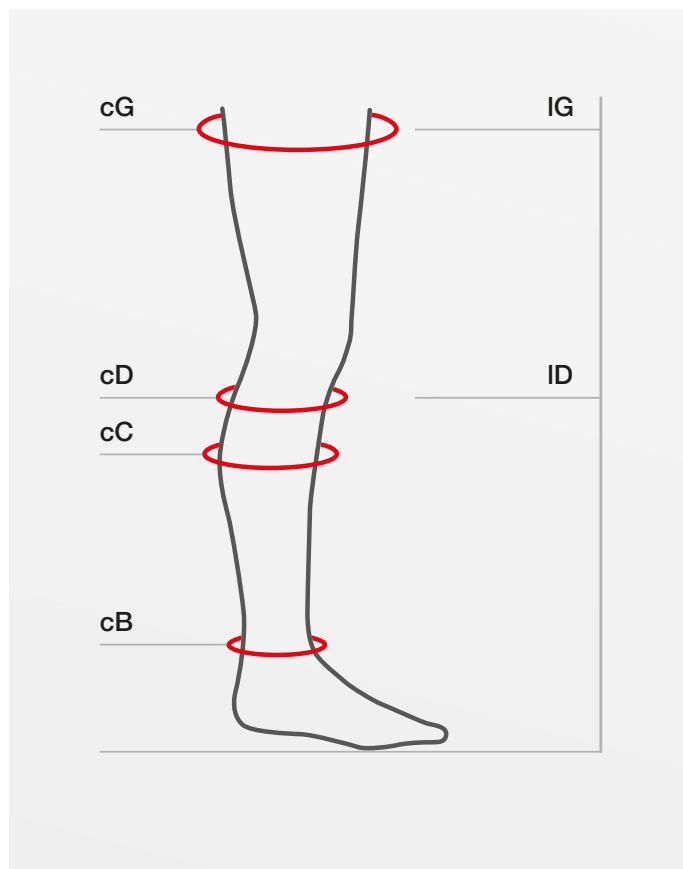

AD gesloten teenstuk, beige



AG met 5 cm siliconen noppenboord, open teenstuk, beige



AD open teenstuk, beige



VENOSAN® Prestige

De echte allrounder.



Levert effectieve compressie.


Geschikt voor mannen en vrouwen, niet te dun, gemakkelijk aan te trekken en met een nauwkeurig gedefinieerde drukgradiënt.

- Latexvrij – voor mensen met een overgevoeligheid voor latex of een latexallergie
- Voelt zacht en aangenaam aan op de huid
- Biedt effectieve compressie met een lage tot middelmatige stiffness
- Ondoorschijnend
- Ruime confectiemaattabel
- Hoog aan- en uittrekgemak
- Kan op max. 40 °C op een fijnwasprogramma in de wasmachine worden gewassen

		teenstuk	AB	AD	AD silb. 3/5 cm	AG	AG silb. 5 cm	AT
Prestige CCL 2	open		●	● ●	● ●	●	●	–
	gesloten	–	–	● ●	● ●	–	●	●
Prestige CCL 3	open	–	–	●	●	–	●	–
	gesloten	–	–	–	–	–	–	–



Standaardstijlen:

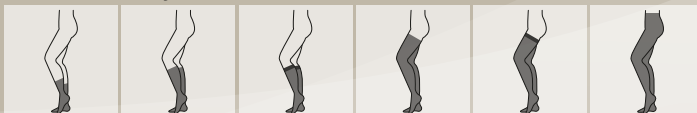

Indicaties

- Chronische veneuze insufficiëntie (CVI) 1–3
- Varices
- Zwangerschapsvarices
- Na veneuze operaties
- Inzetbaar voor mobiele en immobiele cliënt

Materiaalsamenstelling

- **Klasse 2:**
65% Polyamide
35% Lycra®
- **Klasse 3:**
58% Polyamide
42% Lycra®




Maattabel en meetpunten VENOSAN® Prestige

Confectietabel VENOSAN® Prestige 2 en 3


rondbrei beenkousen

Maat (cm)	Small	Medium	Large	X-Large
	normaal / wijd	normaal / wijd	normaal / wijd	normaal / wijd
cT	60-100	60-100	60-100	60-100
cH	80-120	80-120	80-120	80-120
cG silb.	48-56 / 57-66	50-60 / 61-72	53-66 / 66-80	57-73 / 74-90
cG	48-66	50-72	53-80	57-90
cF	42-58	44-62	47-68	51-77
cE	32-41	34-44	37-48	41-54
cD	30-37	32-39	34-42	37-47
cC	31-39	33-41	35-44	39-48
cB1	24-30	26-32	29-35	33-39
cB	19-21	21-23,5	23-27	27-32
cY	28-34	29-35	31-37	34-40
cA	20-24	21-25	22-27	24-30

	lengte AD (cm)	lengte AG (cm)	lengte GT voor AT (cm)	voetlengte IA / IZ (cm)
kort	35 - 38	–	–	16 - 17 / 22 - 24
normaal	38-42	65-76	29-35	17-19 / 23-26
lang	42-47	76-88	–	19-21 / 25-28

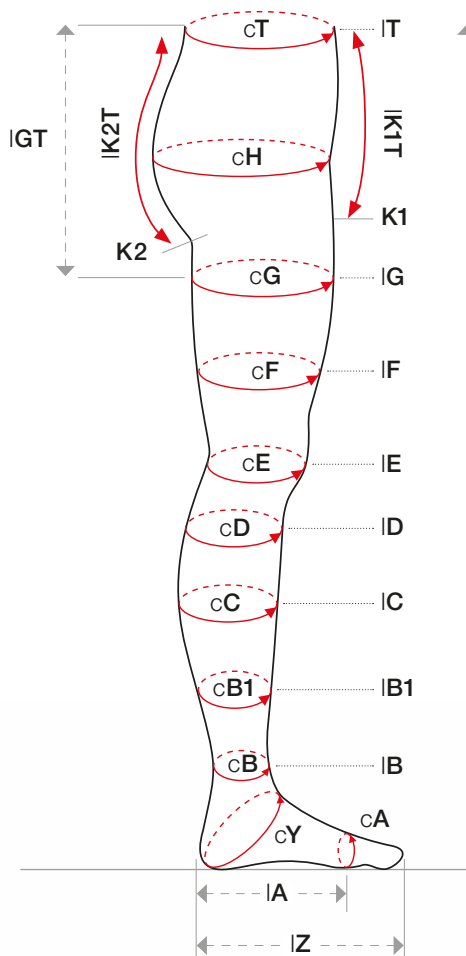

Productie op maat VENOSAN® Prestige

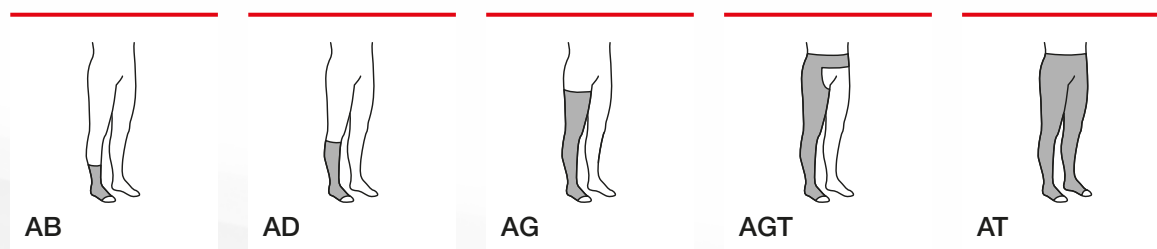

Style	Color	Toe	CCL2	CCL3
AB	Beige / Zwart	Open / Gesloten	Ja	Ja
AD	Beige / Zwart	Open / Gesloten	Ja	Ja
AG	Beige / Zwart	Open / Gesloten	Ja	Ja
AGT	Beige / Zwart	Open / Gesloten	Ja	Ja
AT	Beige / Zwart	Open / Gesloten	Ja	Ja

VENOSAN® Prestige Katoen.

Natuurlijke materialen.



Zacht en aangenaam op de huid dankzij het hoge katoengehalte.

VENOSAN Prestige Katoen is geschikt voor iedereen die de voorkeur geeft aan natuurlijke materialen en toch wil profiteren van de uitstekende eigenschappen van VENOSAN Prestige.

- Latexvrij – voor mensen met een overgevoeligheid voor latex of een latexallergie
- Zacht en aangenaam op de huid dankzij het hoge katoengehalte
- Eenvoudig aan en uit te trekken
- Biedt effectieve compressie
- Ondoorschijnend
- Geschikt voor mannen en vrouwen
- Kan op max. 40 °C op een fijnwasprogramma in de wasmachine worden gewassen
- Ruime confectiemaattabel

	teenstuk	AB	AD	AD silb. 3/5 cm	AG	AG silb. 5 cm	AT
Prestige Katoen CCL 2	open	–	●	●	–	●	–
	gesloten	–	●	●	–	–	●

Standaardstijlen:



Indicaties

- Chronische veneuze insufficiëntie (CVI) 1–3
- Varices
- Zwangerschapsvarices
- Na veneuze operaties
- Inzetbaar voor mobiele en immobiele cliënt

Materiaalsamenstelling

- Klasse 2:
- 42% Polyamide
- 30% Lycra®
- 28% Katoen




Maattabel en meetpunten VENOSAN® Prestige Katoen

Confectietabel VENOSAN® Prestige 2 Katoen


rondbrei beenkousen

Maat (cm)	Small	Medium	Large	X-Large
	normaal / breed	normaal / breed	normaal / breed	normaal / breed
cT	60-100	60-100	60-100	60-100
cH	80-120	80-120	80-120	80-120
cG silb.	48-56 / 57-66	50-60 / 61-72	53-66 / 66-80	57-73 / 74-90
cG	48-66	50-72	53-80	57-90
cF	42-58	44-62	47-68	51-77
cE	32-41	34-44	37-48	41-54
cD	30-37	32-39	34-42	37-47
cC	31-39	33-41	35-44	39-48
cB1	24-30	26-32	29-35	33-39
cB	19-21	21-23,5	23-27	27-32
cY	28-34	29-35	31-37	34-40
cA	20-24	21-25	22-27	24-30

	lengte AD (cm)	lengte AG (cm)	lengte GT voor AT (cm)	voetlengte IA / IZ (cm)
kort	35 - 38	-	-	16 - 17 / 22 - 24
normaal	38-42	65-76	29-35	17-19 / 23-26
lang	42-47	76-88	-	19-21 / 25-28

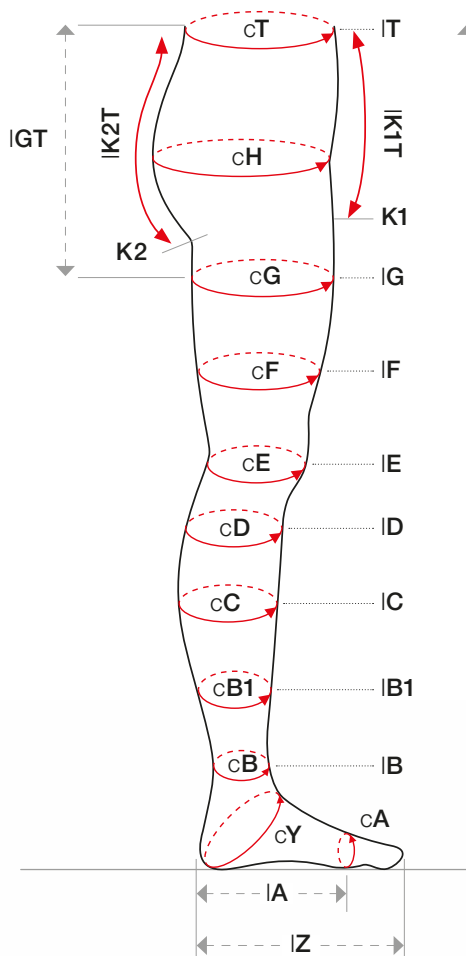

Productie op maat VENOSAN® Prestige Katoen

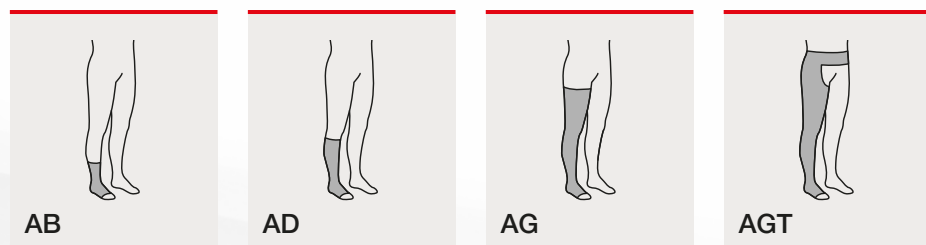

Style	Color	Toe	CCL2	CCL3
AB	Beige	Open / Gesloten	Ja	Ja
AD	Beige	Open / Gesloten	Ja	Ja
AG	Beige	Open / Gesloten	Ja	Ja
AGT	Beige	Open / Gesloten	Ja	Ja

Notities



People.Health.Care.

Support for Life 



Wij staan voor u klaar met onze 'Support for Life'.
Ons doel is te luisteren, te helpen en mogelijkheden te bieden om patiënten zelfstandig met hun aandoening om te leren gaan en deze effectief te behandelen.



Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher B.V · Antennestraat 86-B · 1322 AS Almere

VENOSAN® is een gedeponeerd handelsmerk van
SWISSLASTIC AG, St. Gallen, Switzerland – an  Company

For more info visit
www.SupportforLife.com



2005365 0125 nl