


# Cellona® Polster Schnittmuster für Filztechniken

Typischerweise werden zwei diagonal gekürzte Lagen und eine ganze Lage benötigt. Bei besonders ausgeprägter Inversion/Supination können auch drei diagonal gekürzte Lagen benötigt werden.

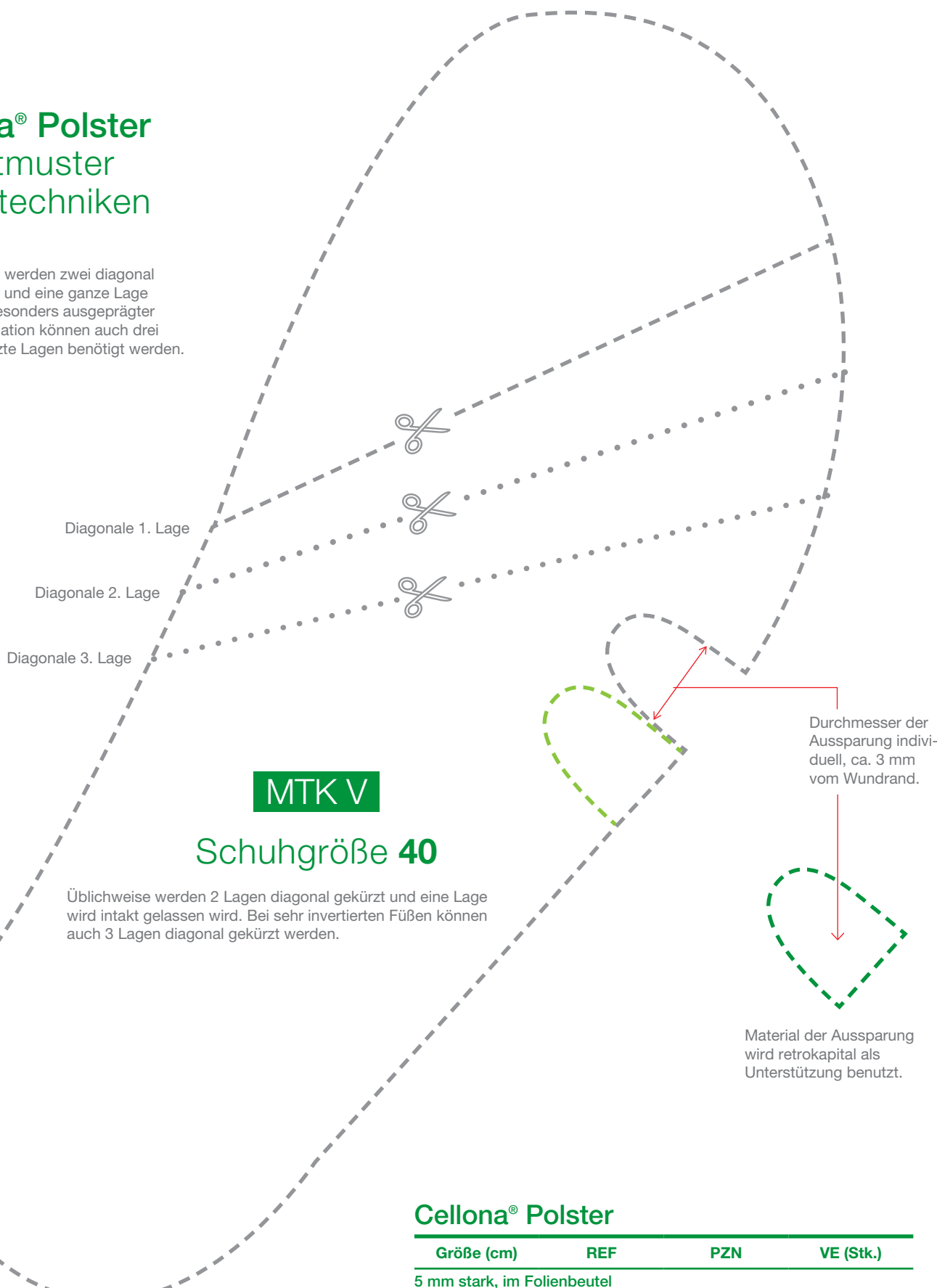

**MTK V**

**Schuhgröße 40**

Üblicherweise werden 2 Lagen diagonal gekürzt und eine Lage wird intakt gelassen. Bei sehr invertierten Füßen können auch 3 Lagen diagonal gekürzt werden.

Durchmesser der Aussparung individuell, ca. 3 mm vom Wundrand.

Material der Aussparung wird retrokapital als Unterstützung benutzt.

## Cellona® Polster

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)
5 mm stark, im Folienbeutel			
19 x 38	50 810	021 914 12	10/60

**Quelle:**  
CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

**Schablone gilt für rechten Fuß.  
Für linken Fuß bitte Blatt wenden.**